



Réponse payée / Respons betaald  
Pays-Bas / Nederland  
Kuraray Dental Benelux B.V.  
Int. Antwoordnummer  
I.B.R.S. / C.C.R.I. Numéro 327  
NL-1970 VB IJmuiden  
PAYS-BAS

# LE TOP 3 DES QUESTIONS, LES PLUS FRÉQUEMMENT POSÉES

**J'utilise CLEARFIL™ SE BOND, mais je continue à mordançer la dentine. Est-ce que ça risque de faire du tort?**

L'acide phosphorique sur la dentine élimine notamment la couche de boue dentinaire, de sorte que le collagène est dénudé et les tubuli s'exposent. Comme l'hydroxyapatite est complètement mordançée, l'adhésion du MDP au calcium n'est plus possible et le risque de douleurs postopératoires augmente. Dans le cas de CLEARFIL™ SE BOND, le risque de douleurs postopératoires augmente, l'adhésion sur la dentine diminue et le scellement n'est plus garanti à long terme. Par conséquent, en cas d'utilisation de CLEARFIL™ SE BOND, il ne faut jamais mordançer la dentine à l'acide phosphorique! Sur le site internet, l'utilisateur trouvera des explications détaillées concernant le fonctionnement de CLEARFIL™ SE BOND.

**L'adhésion à l'émail des systèmes automordançants est-elle quand même moindre que dans le cas de systèmes de mordançage et de rinçage?**

En polissant l'émail, la couche extérieure de l'émail résistante à l'acide est enlevée et la possibilité de mordançer augmente. Si l'émail n'est pas poli, le mordançage à l'acide phosphorique peut suffire. L'application d'acide phosphorique sur l'émail seul, également après l'avoir rendu rugueuse à la fraise ou à la sabreuse, renforce l'adhésion de CLEARFIL™ SE BOND à l'émail. Toutefois, les propriétés d'adhésion de CLEARFIL™ SE BOND sont telles que cela n'est pas nécessaire pour la rétention. Une étude sur 8 années, menée à l'Université de Louvain et portant sur l'adhésion de restaurations de classe V, démontre qu'il n'y a quasiment aucune différence entre des restaurations

## LA FOIRE AUX QUESTIONS SUR CLEARFIL™ SE BOND: WWW.KURARAY-DENTAL.EU

**Les systèmes de mordançage et de rinçage à 3 étapes sont-ils toujours le "Golden Standard"?**

Les systèmes automordançants existent depuis 18 ans, depuis l'introduction de CLEARFIL™ LINER BOND 2. Dans la catégorie des systèmes adhésifs automordançants, CLEARFIL™ SE BOND est le "golden standard" depuis des années déjà. Entre-temps, une large expérience clinique a été acquise et des résultats variables dans le cadre d'études à long terme (Van Dijken, 2007). Les différences sur le plan de la qualité entre les diverses marques de systèmes automordançants restent les plus grandes car les systèmes automordançants à 1 étape y sont également inclus. Une étude de Van Meerbeek (2010) a analysé pour la première fois de près les prestations cliniques de systèmes automordançants doux au cours des 10 années écoulées. Dans cette étude, la catégorie des systèmes automordançants doux (CLEARFIL™ SE BOND) affiche même des résultats supérieurs par rapport au groupe des systèmes de mordançage et de rinçage à 3 étapes. Cette récente publication a débouché sur un glissement révolutionnaire concernant la notion de "golden standard" des systèmes de mordançage et de rinçage à 3 étapes vers le système automordançant CLEARFIL™ SE BOND.

pour lesquelles CLEARFIL™ SE BOND a été appliqué conformément au mode d'emploi et pour lesquelles un mordançage sélectif a eu lieu uniquement sur l'émail. (Peumans, 2010).

# NUMÉRO 1 LE SYSTÈME ADHÉSIF Kuraray



LA FOIRE AUX QUESTIONS SUR  
CLEARFIL™ SE BOND:  
WWW.KURARAY-DENTAL.EU

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| If undelivered please return to: | Belgique - België. |
|                                  | P.P. - P.B.        |
|                                  | BPI / 955          |

Boîte postale 47  
2240 Zandhoven  
Belgique

# CLEARFIL™ SE BOND



SCORE DE RÉTENTION DE 97%!

## LE SYSTÈME ADHÉSIF LE PLUS UTILISÉ CLEARFIL™ SE BOND


Dans le cadre d'une étude clinique, menée sur 8 années et portant sur des restaurations de classe 5, réalisées en combinaison avec CLEARFIL™ AP-X, CLEARFIL™ SE BOND affiche **un score de rétention de 97% !<sup>1</sup>** CLEARFIL™ SE BOND enregistre, en effet, des résultats qui sont tout aussi bons, voire meilleurs, que les systèmes de mordançage et de rinçage à 3 étapes. Cette garantie est également attestée par plus de 10 ans d'utilisation clinique. Ce produit garantit d'une adhésion inédite, d'un excellent scellement à long terme, d'une insensibilité relative à la technique et d'une absence de douleurs postopératoires. Eu égard à ces résultats exceptionnels, la revue professionnelle "Reality" a décerné à CLEARFIL™ SE BOND le titre de "meilleure liaison dans la catégorie" et, aujourd'hui, CLEARFIL™ SE BOND est le système adhésif le plus utilisé.

<sup>1</sup> Peumans M, et al. Eight-year clinical evaluation of a 2-step self-etch adhesive with and without selective enamel etching. Dent Mater 2010.

## LE SYSTÈME ADHÉSIF LE PLUS ÉTUDIÉ CLEARFIL™ SE BOND

Bons résultats consistants. CLEARFIL™ SE BOND a, après son introduction en 2000, démontré une qualité constante dans diverses circonstances et auprès de différents opérateurs (voir graphique)<sup>2</sup>. Ayant fait l'objet de 250 études en 5 ans, CLEARFIL™ SE BOND est ainsi le système adhésif le plus étudié au monde<sup>3</sup> et, de ce fait, il peut à juste titre être qualifié de "Golden Standard".

### CLEARFIL™ SE BOND

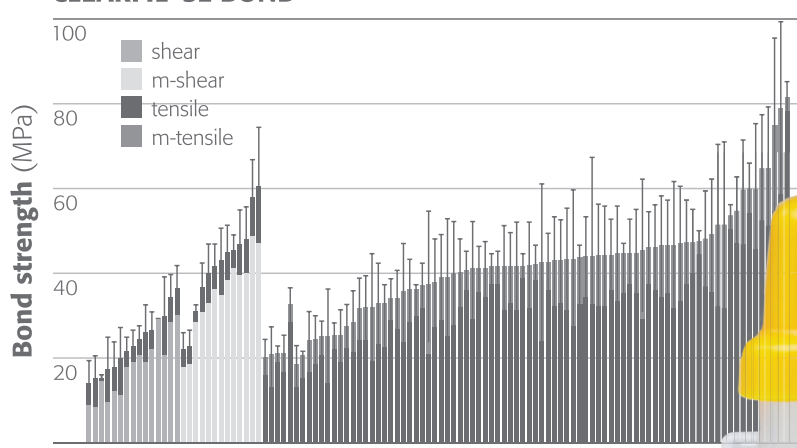

<sup>2</sup> Scherrer SS, et al. Direct comparison of the bond strength results of the different test methods; A critical literature review. Dent Mater 2010.  
<sup>3</sup> Van Meerbeek B, et al. Relationship between bond-strength tests and clinical outcomes. Dent Mater 2010.




GOLDEN STANDARD

## LE SYSTÈME ADHÉSIF NUMÉRO 1 CLEARFIL™ SE BOND

Une adhésion supérieure à la dentine et un faible nombre d'échecs en matière d'étude clinique (voir graphique)<sup>1</sup>. Inutile de préciser que l'avenir appartient aux systèmes automordançants doux, plus particulièrement à CLEARFIL™ SE BOND que l'on peut à juste titre qualifier de système adhésif numéro 1.

### Taux annuel d'échec des adhésifs pour les restaurations de classe V (%)

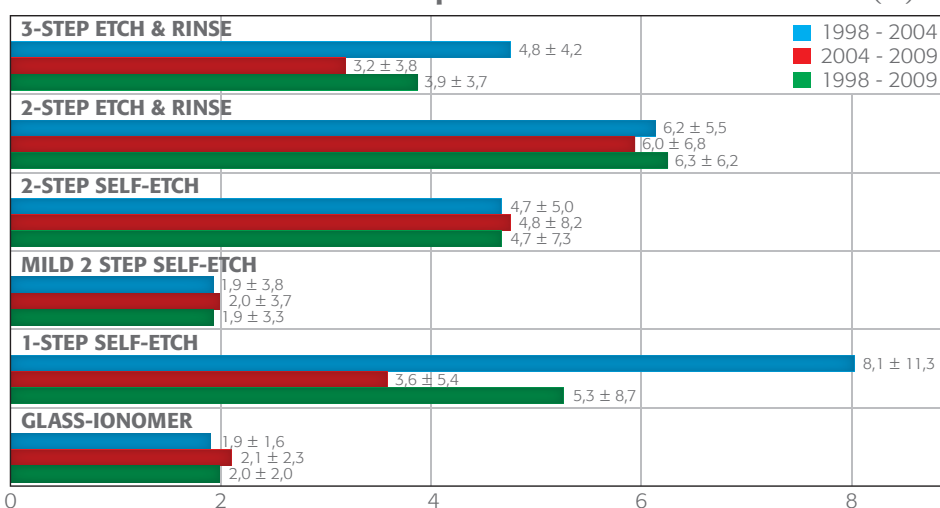

Kuraray Dental Benelux  
La Belgique: Tél.: +32 (0)475 616 050, e-mail: dental-be@kuraray.eu, www.kuraray-dental.eu

Les Pays Bas: Boîte postale 299, 1970 AG IJmuiden, Les Pays-Bas, tél: +31 (0)255 523 701, fax: +31 (0)255 523 630, e-mail: dental-nl@kuraray.eu, www.kuraray-dental.eu

LA FOIRE AUX QUESTIONS SUR CLEARFIL™ SE BOND:  
**WWW.KURARAY-DENTAL.EU**

### Qui, je commande...

- ☐ CLEARFIL™ SE BOND emballage complet € 132,87
- ☐ CLEARFIL™ SE BOND Primer € 44,29
- ☐ CLEARFIL™ SE BOND Bond € 88,58

### Je souhaite un complément d'information:

- ☐ Veuillez me contacter pour une liaison
- ☐ veuillez me contacter pour un Cours sur Mesure
- ☐ J'aimerais recevoir la publication:
  - Eight-year clinical evaluation of a 2-step self-etch adhesive with and without selective enamel etching.
  - Relationship between bond-strength tests and clinical outcomes.
  - Direct comparison of the bond strength results of the different test methods; A critical literature review.
- ☐ Envoyez-moi le catalogue Kuraray
- ☐ Envoyez-moi le CD des Procédures CLEARFIL™

Nom du cabinet

Monsieur/Madame\* Initiales

Nom

Rue

Code postal

Localité

☐ Oui, je souhaite recevoir le bulletin d'information numérique. E-mail

Dépôt dentaire

Signature

\* Biffer les mentions inutiles. Les prix s'entendent hors TVA. Sous réserve de modifications de prix. Les produits sont livrés selon les prix pratiqués par le dépôt dentaire de votre choix.