



CLEARFIL™ S³ BOND PLUS

[CLEARFIL TRI-S BOND PLUS]

CE
0197

TÜRKÇE KULLANMA KILAVUZU

I. GİRİŞ

CLEARFIL TRI-S BOND PLUS, tek bir likit kullanarak dentin ve minenin eş zamanlı tedavi edilmesine izin veren, tek komponentli, ışııkla polimerize olan bir bonding ajanıdır.

II. ENDİKASYONLAR

- CLEARFIL TRI-S BOND PLUS aşağıdaki vakalarda endikedir:
- [1] Işııkla polimerize olan kompozit rezinler kullanılarak yapılan direkt restorasyonlarda
 - [2] İndirekt restorasyonlar için ön tedavi olarak kavite örtülmede
 - [3] Açığa çıkan kök yüzeylerinin tedavisinde
 - [4] Seramik, hibrid seramik veya kompozit rezinden yapılmış restorasyonların intraoral tamirinde
 - [5] Seramik, hibrid seramik veya kompozit rezinden yapılmış protetik restorasyonların yüzey tedavisinde
 - [6] Dental postların yüzey tedavisinde
 - [7] CLEARFIL DC CORE PLUS dual-curing kompozit rezin ile yapılan kor üst yapıları ve post simantasyonlarında
 - [8] Işııkla polimerize olan kompozit rezin ile yapılan kor üst yapılarında

III. KONTRENDİKASYONLAR

Metakrilat monomerlerine karşı hipersensitivite gösteren hastalarda kullanılmamalıdır.

IV. OLASI YAN ETKİLER

Mukoz membranın BOND ile temas etmesi halinde mukoz membran, protein koagülasyonu sonucu hafif beyazımsı bir renk alabilir. Bu durum geçici bir fenomen olmakla birlikte birkaç gün içerisinde kendiliğinden ortadan kalkar. Hastalarınızın, beyazımsılaan bölgeleri fırçalayarak tahriş etmemeleri konusunda gereken şekilde bilgilendirin.

V. UYUMSUZLUKLAR

- [1] Öjenol, polimerizasyon sürecinin gecikmesine neden olabileceği için, pulpa koruması ve geçici örtüleme amacıyla öjenol içeren materyaller kullanmayın.
- [2] Geri kalan demir iyonları, adezyon gücünün bozulmasına ve diş etlerinde renklenmeye neden olabilecekleri için, hemostatik içeren demir bileşikleri kullanmayın.
- [3] Alüminyum klorür içeren hemostatik ajanların kullanılması halinde, kullanım miktarını en aza indirin ve bunların aderent yüzey ile temas etmemesine dikkat edin. Buna uyulmaması durumunda diş yapısına bağlanma gücünde azalma görülebilir.

VI. ÖNLEMLER

- 1. Güvenlik önlemleri**
 - [1] Bu ürün, alerjik reaksiyonlara yol açabilen maddeler ihtiva etmektedir. Ürünü, metakrilat monomerlere veya diğer bileşenlerine karşı alerjisi olduğu bilinen hastalarda kullanmaktan kaçının.
 - [2] Hastanın kızarıklık, iltihaplanma belirtileri, ülser, şişme, kaşınma veya uyuşma gibi bir hipersensitivite reaksiyonu göstermesi durumunda, ürünün kullanımını sonlandırıp, ürünü uzaklaştırın ve hastanın tıbbi yardım almasını sağlayın.
 - [3] Ürünün, cilt veya göz ile temas etmemesi için dikkatli davranın. Hastanın gözlerini sıçrayabilecek materyallere karşı korumak için, ürünü uygulamadan önce, hastanın gözlerini bir havlu ile örtün.
 - [4] Ürünün, insan vücut dokuları ile temas etmesi durumunda aşağıdaki tedbirleri alın:

<Ürünün göze kaçması durumunda>

Gözü derhal bol miktarda su ile yıkayın ve bir hekime başvurun.

<Ürünün cilt veya oral mukozaya ile temas etmesi durumunda>

Temas bölgesini derhal alkole batırılmış bir pamuk parçasıyla veya gazlı bezle silin ve bol miktarda suyla yıkayın.
 - [5] Hastanın ürünü kazayla yutmasını önleyecek tedbirler alın.
 - [6] Ürünü sertleştirirken doğrudan dental polimerizasyon ışığına bakmaktan kaçının.
 - [7] Çapraz enfeksiyonları önlemek için, hazırlama kabına aktarılmış ürünü ve ilgili uygulama fırçasını farklı hastalar için kullanmamaya dikkat edin. Uygulama fırçasını kullandıktan sonra çöpe atın.
 - [8] Metakrilat monomer ile temas nedeniyle oluşabilecek hipersensitiviteyi önlemek için, eldiven giymeli veya diğer uygun önlemler alınmalıdır.

2. Güvenli kullanım bilgileri

- [1] Ürün yalnızca [II.ENDİKASYONLAR] altında belirtilen kullanım amacı doğrultusunda kullanılabilir.
- [2] Ürün yalnızca yetkili diş hekimleri tarafından uygulanabilir.
- [3] Ürün, yanıcı bir madde olan etanol içerir. Ürünü, açık alev kaynaklarına yakın yerlerde kullanmayın.
- [4] Pulpaya yakın kavite yüzeyine veya kazara açığa çıkmış pulpaya bir pulpa örtüleme ajanını uygun şekilde uygulayın.
- [5] Performans ve işleme özelliklerinin olumsuz yönde etkilenmemesi için, verilen ışııkla polimerizasyon sürelerine ve diğer uygulama direktiflerine uyun.
- [6] Zayıf bonding sonuçlarını önlemek için, kavite iyicene temizlenmelidir. Aderent yüzeyin, kan veya tükürük ile kontamine olmuş olması durumunda bonding işlemine geçmeden önce yüzeyi dikkatlice yıkayın ve kurutun.
- [7] Ürünü, çalışma ışığına veya doğal ışığa karşı korumak için, ışığı bloke eden plakayı kullanın ve ürünü, karıştırdıktan sonra 7 dakika içerisinde kullanın. BOND'un içerdiği uçucu özelliğe sahip etanolün buharlaşmasıyla ürünün viskozitesi artar ve bunun sonucu olarak ürünün uygulanması zorlaşır.
- [8] BOND'un aderent yüzeye uygulanması sırasında ve uygulama sonrası 10 saniyelik bekleme süresi boyunca ışııkla ucuunu hastanın ağızından çıkartın veya ışığı, BOND'un çalışma ışığına maruz kalıp bunun sonucu olarak jelleşmesini önlemek için, kapatın. 10 saniyelik uygulama süresi dolduğunda yüzeyi,

- bir an önce, hafif hava sıkarak gerekli düzeyde kurutun.
- [9] BOND, etanol ve su içerir. En az 5 saniye boyunca, bond artık hareket etmeye kadar, tüm aderent yüzeyi, hava sıkarak gereken şekilde kurutun. Buna uyulmaması durumunda adezyon gücü azalabilir. Yeterli düzeyde kuruma elde edebilmek için, uygulanan hava basıncını, kavite ve protetik uygulamanın şekline ve büyüklüğüne göre düzenleyin. Bond likidinin etraftaki dokulara sıçramasını önlemek için bir vakum aspiratör kullanın.
- [10] BOND'u başka bonding ajanları ile birlikte kullanmayın. Materyallerin birbiriyle karıştırılması, beklenen özelliklerin olumsuz yönde etkilenmesi gibi, fiziksel özelliklerin değişmesi ile sonuçlanabilir.
- [11] Karışımı, CLEARFIL PORCELAIN BOND ACTIVATOR haricinde başka bir silan örtüleme ajanı ile birlikte kullanmayın.
- [12] İşlem görmüş yüzey kontaminasyona uğramış ise, su ile yıkayın ve kurutun ya da alkolle temizleyip ürünü tekrar uygulayın.
- [13] Aderent yüzeyin değerli metale uzanması durumunda, bir metal adeziv primer uygulayın.
- [14] Aderent yüzeyin kesilmemiş minneye de kapsamı durumunda, kesilmemiş minneye bir fosforik asitleme jeli (örn. K-ETCHANT GEL) uygulayın ve 10 saniye beklettikten sonra su ile yıkayın ve ardından kurutun. Ardından ürünü aderent yüzeye uygulayın.
- [15] BOND ile bir dental postun yerleştirilmesi durumunda, CLEARFIL DC CORE PLUS haricinde başka bir dental kor üst yapı materyali kullanmayın.
- [16] Düşük ışın yoğunluğu, düşük adezyona neden olur. Lambanın kullanım ömrünü ve dental polimerizasyon lambasının ışın verme ucunun kontaminasyona uğramış olup olmadığını kontrol edin. Dental ışııkla sertleştirme yoğunluğunun, uygun bir ışın ölçme cihazı yardımıyla, periyodik olarak kontrol edilmesi tavsiye olunur.
- [17] Dental polimerizasyon cihazın ışııkla ucu, rezin yüzeyine mümkün olduğunca yakın ve dikey gelecek şekilde tutulmalıdır. Büyük bir rezin yüzeyi ışııkla sertleştirilecekse, ilgili bölgeyi birkaç alana bölüp, her alanı ayrı ayrı ışııkla polimerize edin.

3. Saklama koşulları

- [1] Ürün, ambalajda belirtilen son kullanım tarihinden önce kullanılmıdır.
- [2] Ürün kullanılmadığı zamanlarda buzdolabında (2-8°C/36-46°F) saklanmalıdır. Kullanmadan önce, en az 15 dakika boyunca, oda sıcaklığına gelmesine izin verilmelidir. Buzdolabından çıkartıldıktan sonra ürünü oda sıcaklığına gelmesi beklenilmelidir. Aksi takdirde, uygulama sırasında gerekenden fazla sıvı akabilir veya kullandıktan sonra dışarı sızabilir.
- [3] Ürünün içerdği uçucu solventin (etanol) buharlaşmasını azaltmak için, şişenin kapağı kullandıktan hemen sonra sıkıca kapatılmalıdır. Sıvı kolayca akmaması durumunda, ağız tıkanmış olabilir. Likidi tıkanan şişeden zor kullanarak dışarı aktarmayın.
- [4] Likidin, uzun süre kullanılmaması sonucunda kolay boşalması durumunda, şişeyi kullanmadan önce çalkalayın.
- [5] Aşırı sıcaklardan, direkt güneş ışığından ve alevlerden uzak tutun.
- [6] Ürün sadece dental uzmanların erişebileceği, uygun bir yerde muhafaza edilmelidir.

VII. İÇERİĞİ

İçerik ve miktar için lütfen ambalajın dış yüzeyine bakın.

- [1] BOND
 - Temel bileşenleri:
 - 10-Metakrililoliksidesil dihidrojen fosfat (MDP)
 - Bisfenol A diglisidil metakrilat (Bis-GMA)
 - 2-hidroksietil metakrilat (HEMA)
 - Hidrofilik alifatik dimetakrilat
 - Hidroforik alifatik metakrilat
 - Kolloidal silika
 - Sodyum florür
 - dl-kamforinon
 - Akseleratörler
 - Başlatıcılar
 - Etanol
 - Su
- [2] Aksesuarlar
 - Applicator brush (fine <silver>) [Uygulama fırçası (ince <gümüş>)]
 - Applicator brush (endo <black>) [Uygulama fırçası (endo <siyah>)]
 - Dispensing dish (Hazırlama kabı)
 - Light blocking plate (Işığı bloke eden kapak)

VIII. KLİNİK İŞLEMLER

A. Standart prosedür I (Endikasyonlar: [1] ila [3] arasında)

- [1] Işııkla polimerize olan kompozit rezinleri kullanılarak yapılan direkt restorasyonlarda
- [2] İndirekt restorasyonlar için ön tedavi olarak kavite örtülmede
- [3] Açığa çıkan kök yüzeylerinin tedavisinde

A-1. Nem kontrolü

Mümkün olan en iyi sonuçları elde edebilmek için tedavi alanının, tükürük veya kan ile kontaminasyona uğramamasına dikkat edin. Dişi temiz ve kuru tutmak için, bir lastik örtünün (rubber dam) kullanılması tavsiye olunur.

A-2. Kavitenin hazırlanması

Bir çürük tespit materyali (örn. CARIES DETECTOR) kullanarak, tüm enfekte dentini işaretleyip, uzaklaştırın ve ardından kaviteyi alışagelmış şekilde prepare edin.

A-3. Pulpanın korunması

Açığa çıkmış pulpa ve pulpaya yakın bölgeler, hızlı sertleşen bir kalsiyum hidroksit materyali ile örtülmelidir. Simanla astarlamaya veya kaide koymaya gerek yoktur. Pulpanın korunması amacıyla öjenol içeren materyaller kullanmayın.

A-4. Mine yüzeyinin asitle pürüzlendirilmesi

Aderent yüzeyin kesilmemiş minneye de kapsamı durumunda, kesilmemiş minneye bir fosforik asitleme jeli (örn. K-ETCHANT GEL) uygulayın ve 10 saniye beklettikten sonra su ile yıkayın ve ardından kurutun. Kesilmiş minenin asitle asitlendirilmesi tercih edilmesi durumunda, yukarıda anlatılan şekilde kesilmiş minneye bir fosforik asitleme jelinin uygulanması mecburi değildir.

A-5. BOND'un uygulanması

- [1] Uygulamadan hemen önce, hazırlama kabına gerekli miktarda BOND'u hazırlayın.
- [2] Uygulama fırçası ile BOND'u tüm kavite duvarlarına uygulayın. 10 saniye bekletin. Karışım uygulanmış yüzeyin tükürük veya eksüda ile temas etmemesine dikkat edin.
- [3] Bond hareket etmeye dek, en az 5 saniye olmak üzere, tüm kavite duvarını hafif hava sıkarak gereken düzeyde kurutun. Bond likidinin etraftaki dokulara sıçramasını önlemek için bir vakum aspiratör kullanın.
- [4] BOND'u 10 saniye boyunca, bir dental polimerizasyon cihazı kullanarak, ışııkla polimerize edin (bkz. "Dental polimerizasyon cihazı").

Tablo: Dental polimerizasyon cihazı

Uç	Işık kaynağı	Dalga boyu aralığı ve ışık yoğunluğu
Halojen	Halojen lambası	Işık yoğunluğu ²⁾ 300 mW/cm ² 'nin üzerinde, dalga boyu aralığı 400 - 515 nm arasında
LED	Mavi LED ¹⁾	Işık yoğunluğu ³⁾ 300 mW/cm ² 'nin üzerinde, dalga boyu aralığı 400 - 515 nm arasında

1) Maksimum emisyon spektrumu: 450 - 480 nm

2) ISO 10650-1 standartına göre değerlendirilmiştir

3) ISO 10650-2 standartına göre değerlendirilmiştir

A-6. Kompozit rezin restoratifinin yerleştirilmesi

A-6a. Işııkla polimerize olan kompozit rezinleri kullanarak yapılan direkt restorasyonlar

Kaviteyle kompozit rezini (örn. CLEARFIL MAJESTY Esthetic, CLEARFIL MAJESTY Posterior, CLEARFIL MAJESTY Flow) uygulayın ve üreticinin Kullanma Talimatlarına uyararak uygulayın, ışııkla sertleştirin, polisaj işlemlerini yapın.

A-6b. Kavite örtüleme ve açığa çıkan kök yüzeyinin tedavisi

Dişe, ince bir tabaka kompozit rezin (örn. CLEARFIL MAJESTY Flow) uygulayın ve ilgili Kullanma Talimatlarını referans alarak ışııkla polimerize edin. Polimerize olmamış rezini alkole batırılmış bir pamuk parçası kullanılarak uzaklaştırın.

B. Standart prosedür II (Endikasyonlar: [4])

[4] Seramik, hibrid seramik veya kompozit rezinden yapılmış restorasyonların intraoral tamirinde

(1) BOND ve CLEARFIL PORCELAIN BOND ACTIVATOR karışımının silan tedavisi için kullanıldığıında

B(1)-1. Aderent yüzeylerin hazırlanması

Elmas bir frez kullanarak aderent yüzeyleri pürüzlendirin ve marjinal alanda eğim oluşturun.

B(1)-2. Aderent yüzeylerin asitletmesi (asit etching uygulanması)

Aderent yüzeye (diş yapısı dahil olmak üzere) K-ETCHANT GEL'i uygulayın. 5 saniye beklettikten sonra su ile yıkayın ve ardından kurutun.

B(1)-3. Değerli metal yüzeylerin işlenmesi

Aderent yüzeyin değerli metale uzanması durumunda bir metal adeziv primer (örn. ALLOY PRIMER) uygulayın ve üreticinin talimatlarına uyararak kurutun.

B(1)-4. Silan tedavisi / bonding

- [1] Uygulama fırçasını kullanarak hazırlama kabına birer damla BOND ve CLEARFIL PORCELAIN BOND ACTIVATOR aktarın ve birbiriyle karıştırın.

[NOT]

BOND ve CLEARFIL PORCELAIN BOND ACTIVATOR uygulamanın hemen öncesinde karıştırılmalıdır.

- [2] Karışımı tüm aderent yüzeye uygulayın. 5 saniye bekletin. Aderent yüzeyin dişle uzanması durumunda, karışımı 10 saniye bekletin. Karışımın uygulanmış yüzeyin tükürük veya eksüda ile temas etmemesine dikkat edin.
- [3] Bond hareket etmeye dek, en az 5 saniye olmak üzere, aderent yüzeyi hafif hava sıkarak gereken düzeyde kurutun. Bond likidinin etraftaki dokulara sıçramasını önlemek için bir vakum aspiratör kullanın.
- [4] BOND'u 10 saniye boyunca bir dental polimerizasyon cihazıyla polimerize edin (bkz. A-5 altında "Dental polimerizasyon cihazı").

B(1)-5. Kompozit rezin restoratifinin yerleştirilmesi

Kaviteyle kompozit rezini (örn. CLEARFIL MAJESTY Esthetic, CLEARFIL MAJESTY Posterior, CLEARFIL MAJESTY Flow) üreticinin Kullanma Talimatlarına göre uygulayın ve ışııkla sertleştirin, polisaj işlemlerini yapın.

[NOT]

Metal rengi maskelemek için bir opak rezin (örn. CLEARFIL ST OPAQUER) kullanın.

(2) Diğer silan bağlama ajanlarının kullanılması ve BOND'un diş yüzeyine uygulanması durumunda

B(2)-1. Aderent yüzeyin hazırlanması

Elmas bir frez kullanarak aderent yüzeyi pürüzlendirin ve marjinal alanda eğim oluşturun

B(2)-2. Aderent yüzeyin asitlenmesi (asit etching uygulanması)

Aderent yüzeye K-ETCHANT GEL'i uygulayın. 5 saniye beklettikten sonra su ile yıkayın ve ardından kurutun.

B(2)-3. Metal yüzeylerin işlenmesi

Aderent yüzey metale uzanması durumunda bir metal adeziv primer (örn. ALLOY PRIMER) üreticinin talimatlarına göre uygulayın kurutun.

B(2)-4. Silan uygulaması

Üreticinin talimatlarını referans alarak, aderent yüzeye (seramik veya kompozit rezin) bir silan bağlama ajanı (örn. CLEARFIL CERAMIC PRIMER) uygulayın ve yüzeyi kurutun.

B(2)-5. Bonding

1. BOND'u diş yapısına uygulayın. 10 saniye bekletin. Karışım uygulanmış yüzeyin tükürük veya eksüda ile temas etmemesine dikkat edin.
2. Bond hareket etmeye dek, en az 5 saniye olmak üzere, tüm aderent yüzeyi hafif hava sıkarak gereken düzeyde kurutun. Bond likidinin etraftaki dokulara sıçramasını önlemek için bir vakum aspiratör kullanın.
3. BOND'u 10 saniye boyunca bir dental polimerizasyon cihazıyla polimerize edin (bkz. A-5 altında "Dental polimerizasyon cihazı").

B(2)-6. Kompozit rezin restoratifinin yerleştirilmesi

Kaviteye kompozit rezini (örn. CLEARFIL MAJESTY Esthetic, CLEARFIL MAJESTY Posterior, CLEARFIL MAJESTY Flow) üreticinin Kullanma Talimatlarına göre uygulayın ve ışınlı sertleştirin, polisaj işlemlerini yapın.

[NOT]

Metal rengi maskelemek için bir opak rezin (örn. CLEARFIL ST OPAQUER) kullanın.

C. Standart prosedür III (Endikasyonlar: [5])

[5] Seramik, hibrid seramik veya kompozit rezinden yapılmış protetik restorasyonların yüzey tedavisinde

C-1. Yüzeyin hazırlanması

Gereken durumlarda protetik restorasyonun aderent yüzeyini, 30 ila 50 µm boyuttaki alumina tozu kullanarak, 0,1-0,4 MPa (1-4 kgf/cm²) hava basıncı altında kumlayın. Yontulmaya yol açmamak için, hava basıncı materyal ve/veya protetik restorasyonun şekline göre ayarlanmalıdır. Kumlama işleminin ardından restorasyonu, ultrasonik bir ünite kullanarak 2 dakika boyunca temizleyin. Ardından hava sıkarak kurutun.

C-2. Aderent yüzeyin asitlenmesi (asit etching uygulanması)

Aderent yüzeye K-ETCHANT GEL'i uygulayın. 5 saniye beklettikten sonra su ile yıkayın ve ardından kurutun.

C-3. Yüzeyin işlenmesi

1. Uygulama fırçasını kullanarak hazırlama kabına birer damla BOND ve CLEARFIL PORCELAIN BOND ACTIVATOR aktarın ve birbiriyle karıştırın.
[NOT]
BOND ve CLEARFIL PORCELAIN BOND ACTIVATOR uygulamanın hemen öncesinde karıştırılmalıdır.
2. Karışımı tüm aderent yüzeye uygulayın. 5 saniye bekletin.
3. Bond hareket etmeye dek, en az 5 saniye olmak üzere, tüm aderent yüzeyi hafif hava sıkarak gereken düzeyde kurutun.

C-4. Simantasyon

Üreticinin kullanma talimatlarını referans alarak, bir rezin siman yardımıyla protetik restorasyonu simante ediniz.

D. Standart prosedür IV (Endikasyonlar: [6])

[6] Dental postların yüzey tedavisi

(1) Cam fiber postlarda

D(1)-1. Post yüzeyinin asitlenmesi (asit etching uygulanması)

Post yüzeyine K-ETCHANT GEL'i uygulayın. 5 saniye beklettikten sonra su ile yıkayın ve ardından kurutun.

D(1)-2. Yüzeyin hazırlanması

1. Uygulama fırçasını kullanarak hazırlama kabına birer damla BOND ve CLEARFIL PORCELAIN BOND ACTIVATOR aktarın ve birbiriyle karıştırın.
2. Karışımı post yüzeyine uygulayın ve 5 saniye bekletin.
3. Bond hareket etmeye dek, en az 5 saniye olmak üzere, tüm post yüzeyi hafif hava sıkarak gereken düzeyde kurutun.
[DİKKAT]
Cam fiber postları, alumina tozu kullanarak kumlamayın. Aksi takdirde postlar zarar görecektir.

(2) Değersiz metal postlarda

D(2)-1. Yüzeyin hazırlanması

Post yüzeyini, alümina tozu ile kumlayarak pürüzlendirin.

D(2)-2. Yüzeyin hazırlanması

1. Uygulama fırçası yardımıyla BOND'u post yüzeyine uygulayın ve 5 saniye bekletin.
2. Bond hareket etmeye dek, en az 5 saniye olmak üzere, tüm post yüzeyini hafif hava sıkarak gereken düzeyde kurutun.

E. Standart prosedür V (Endikasyonlar: [7])

[7] CLEARFIL DC CORE PLUS dual-curing kompozit rezin ile yapılan post simantasyonları ve kor üst yapılarında

E-1. Nem kontrolü

Mümkün olan en iyi sonuçları elde edebilmek için tedavi alanının, tükürük veya kan ile kontaminasyona uğramamasına dikkat edin. Dişi temiz ve kuru tutmak için, bir lastik örtünün (rubber dam) kullanılması tavsiye olunur.

E-2. Kök kanalının hazırlanması

Kök kanal girişini alışagelmış şekilde hazırlayın ve temizleyin.

E-3. Postun hazırlanması

Uygun çaplı ve uzunluktaki bir postu, prepare edilmiş kök kanalına yerleştiriniz.

E-4. Post yüzeyinin işlenmesi

Cam fiber postlarda

Post yüzeyini, D(1) bölümüne veya ilgili silan bağlama ajanının (örn. CLEARFIL CERAMIC PRIMER) kullanma talimatlarına uyarak işleyin.

Metal postlarda

Post yüzeyini, D(2) bölümüne veya ilgili metal adeziv primerin (örn. CLEARFIL ALLOY PRIMER) kullanma talimatlarına uyarak işleyin.

E-5. BOND'un uygulanması

1. Uygulama fırçası yardımıyla BOND'u tüm aderent yüzeye uygulayın. 10 saniye bekletin. Karışımın uygulanmış yüzeyin tükürük veya eksüda ile temas etmemesine dikkat edin.
2. Bond hareket etmeye dek, en az 5 saniye olmak üzere, tüm aderent yüzeyi hafif hava sıkarak gereken düzeyde kurutun. Bond likidinin etraftaki dokulara sıçramasını önlemek için bir vakum aspiratör kullanın. Fazlalık BOND'u kurutma kağıdı (paper point) ile uzaklaştırın. Gereken durumlarda; fazlalık BOND'u sildikten sonra aderent yüzeyi tekrar kurutun.
[NOT]
Gereken düzeyde kuruma elde etmek için, hava basıncı, aderent yüzeyin şekline ve büyüklüğüne göre ayarlanmalıdır.
3. BOND'u 10 saniye boyunca bir dental polimerizasyon cihazıyla polimerize edin (bkz. A-5 altında "Dental polimerizasyon cihazı").

E-6. Postun ve kor üst yapının yerleştirilmesi

CLEARFIL DC CORE PLUS'u kullanarak, postu ve kor üst yapısını, üreticinin talimatlarını referans alarak, yerleştirin.
[DİKKAT]

CLEARFIL DC CORE PLUS haricinde başka bir dental kor üst yapı yapım malzemesi kesinlikle kullanılmamalıdır.

F. Standart prosedür VI (Endikasyonlar: [8])

[8] Işıklı polimerize olan kompozit rezin ile yapılan kor üst yapıları

Bu yöntemi yalnızca aderent yüzeyin ışıkla ulaşabilir olması durumunda uygulayın.

F-1. Nem kontrolü

Mümkün olan en iyi sonuçları elde edebilmek için tedavi alanının, tükürük veya kan ile kontaminasyona uğramamasına dikkat edin. Dişi temiz ve kuru tutmak için, bir lastik örtünün (rubber dam) kullanılması tavsiye olunur.

F-2. Kök kanalının hazırlanması

Kök kanal girişini alışagelmış şekilde hazırlayın ve temizleyin.

F-3. Post simantasyonu

Postu, bir yapıştırma materyali kullanarak ve üreticinin talimatlarını referans alarak, yerleştirin.

F-4. BOND'un uygulanması

1. Uygulama fırçası yardımıyla BOND'u tüm aderent yüzeye uygulayın. 10 saniye bekletin. Karışımın uygulanmış yüzeyin tükürük veya eksüda ile temas etmemesine dikkat edin.
2. Bond hareket etmeye dek, en az 5 saniye olmak üzere, tüm aderent yüzeyi hafif hava sıkarak gereken düzeyde kurutun. Bond likidinin etraftaki dokulara sıçramasını önlemek için bir vakum aspiratör kullanın.
3. BOND'u 10 saniye boyunca bir dental polimerizasyon cihazıyla polimerize edin (bkz. A-5 altında "Dental polimerizasyon cihazı").

F-5. Kor üst yapıları

Kor üst yapıyı, üreticinin talimatlarını referans alarak, ışıklı polimerize olan kompozit rezin (örn. CLEARFIL PHOTO CORE) ile polimerize edin.

[GARANTİ]

Kuraray Noritake Dental Inc., ısıpatlanabilir şekilde sorunlu olan her türlü ürününü yenisiyle değiştirir. Kuraray Noritake Dental Inc., ürünün kullanımı, uygulanması veya kullanmaması sonucu oluşan, doğrudan veya dolaylı olsun, herhangi kayıp veya hasar için, hiçbir sorumluluk kabul etmez. Kullanıcı, ürünü kullanmadan önce, ürünün kullanım amacının uygun olup olmadığını kontrol etmelidir. Kullanıcı, kullanımla ilgili her türlü riski ve sorumluluğu kendi üstlenir.

[NOT]

"CLEARFIL", "CLEARFIL S³ BOND", "CLEARFIL TRI-S BOND", "CLEARFIL MAJESTY", "CLEARFIL ST" ve "CLEARFIL PHOTO CORE" KURARAY CO., LTD.'nin ticari markalarıdır.

		Kuraray Noritake Dental Inc. 1621 Sakazu, Kurashiki, Okayama 710-0801, Japan
	EMERGO EUROPE Prinsessegracht 20 2514 AP The Hague, The Netherlands	
	Kuraray Europe GmbH Philipp-Reis-Str. 4, 65795 Hattersheim am Main, Germany Phone: +49 (0)69 305 35835 Fax: +49 (0)69 305 98 35835 URL: https://www.kuraraynoritake.eu	
		