

Środki ostrożności w zakresie stosowania i bezpieczeństwa

Polerki

PRODUCENT	STAN REW.	JĘZYK
EVE Ernst Vetter GmbH Neureutstr. 6 75210 Kelttern, Niemcy	03	Polski

PL

ZALECENIA DOTYCZĄCE STOSOWANIA POLEREK EVE

Wszystkie polerki EVE zostały zaprojektowane i skonstruowane do ich konkretnego zastosowania. Niewłaściwe użytkowanie może prowadzić do uszkodzenia tkanek, zwiększonego zużycia lub zniszczenia polerki, jak również powodować zagrożenie użytkownika, pacjenta lub osób trzecich.

PRAWIDŁOWE UŻYCIE:	- Należy stosować turbiny, prostnice i kątnice, które są w idealnym stanie technicznym i higienicznym, co oznacza, że powinny być dobrze konserwowane i prawidłowo czyszczone. Stosowane turbiny i kątnice muszą zapewniać precyzyjne i koncentryczne obroty. - Instrumenty należy wprowadzać jak najdalej. Przed zastosowaniem instrumentów na jakiegokolwiek powierzchni konieczne jest doprowadzenie ich do odpowiedniej prędkości. - W miarę możliwości polerować lekko okrężnymi ruchami, aby uniknąć wgnieceń. - Należy unikać przechyłania lub efektu dźwigni, ponieważ prowadzi to do zwiększonego ryzyka złamania. - Natychmiast wyrzucić zdeformowane lub niekoncentryczne instrumenty obrotowe. - Niezamontowane polerki należy wycentrować po zamontowaniu w celu uniknięcia wibracji podczas użycia. Stosować tylko mandrylki wysokiej jakości. Mandrylki o gorszej jakości mogą się złamać i spowodować uraz. - Należy zawsze nosić okulary ochronne. W przypadku niewłaściwego użytkowania lub wady materiałowej mandrylka, trzonek lub obrabiany przedmiot mogłyby złamać się i stać się niebezpiecznymi obiektami latającymi. Alternatywnie użytkownik może pracować za szybą ochronną. - Należy nosić ochronę dróg oddechowych w celu uniknięcia wdychania pyłu. Ponadto zaleca się system odprowadzania pyłu. Niewłaściwe użytkowanie prowadzi do słabych rezultatów pracy i zwiększonego ryzyka. Produkty EVE mogą być stosowane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.
INSTRUKCJE DOTYCZĄCE PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ:	- Nigdy nie przekraczać maksymalnej prędkości obrotowej. Zalecane i maksymalne prędkości obrotowe są różne w zależności od produktu. Należy sprawdzić zalecane i maksymalne prędkości w naszych najnowszych katalogach i na opakowaniach. - W przypadku przekroczenia maksymalnej prędkości obrotowej polerki mają skłonność do wibracji. Takie wibracje mogą zniszczyć polerkę, zdeformować trzonek i/lub spowodować złamanie instrumentu. W rezultacie użytkownik, pacjent i osoby trzecie mogą ulec urazowi. - Przestrzeganie zalecanego zakresu prędkości obrotowej prowadzi do uzyskania najlepszych możliwych wyników pracy. Nieprzestrzeganie maksymalnej dopuszczalnej prędkości prowadzi do zwiększonego zagrożenia dla bezpieczeństwa.
NACISK PODCZAS APLIKACJI:	- Nadmierny nacisk może zniszczyć polerkę. - Nadmierny nacisk prowadzi do zwiększonego wytwarzania się ciepła. - Nadmierny nacisk może spowodować zwiększone zużycie polerki. Należy unikać nadmiernego nacisku, ponieważ powoduje to przegrzanie, co może spowodować uszkodzenie miazgi. W skrajnych przypadkach instrumenty mogą ulec złamaniu i spowodować urazy.
CHŁODZENIE WODĄ:	W celu uniknięcia niepożądanego wytwarzania się ciepła na zębie wymagane jest wystarczające chłodzenie wodą (co najmniej 50 ml/min). Niewystarczające chłodzenie wodą może prowadzić do nieodwracalnego uszkodzenia zęba i otaczających tkanek.
SYMBOLE:	Wszystkie użyte symbole i piktogramy zgodnie z normą EN ISO 15223.