

Behandeling van blootliggende tandhalzen met CLEARFIL™ PHOTO BOND

Benodigde materialen



Standaard procedure

Prepareren

- 1 Ets gedurende 15-30 seconden de caviteit met K-etchant GEL.
- 2 Spoel gedurende 20 seconden met water en blaas het oppervlak goed droog.

CLEARFIL™ SA PRIMER aanbrengen

- 3 Breng een dunne laag CLEARFIL™ SA PRIMER aan op het behandelde oppervlak en blaas dit met een zachte luchtstroom droog.

Aanbrengen van CLEARFIL™ PHOTO BOND

- 4 Doe 1 druppel Catalyst vloeistof in een mengbakje en voeg hieraan toe 1 druppel Universal vloeistof en meng beide.

- 5 Breng de bonding vloeistof aan en verspreid deze zo egaal mogelijk met een zachte luchtstroom gedurende 2 – 3 seconden.

- 6 Hard de bonding vloeistof vervolgens uit met de lamp gedurende 10 seconden.

Afwerken

- 7 Breng een dunne laag CLEARFIL™ PROTECT LINER F aan en belicht deze 20 seconden.

- 8 Verwijder met een in alcohol gedrenkt watje de ongepolymeriseerde laag kunsthar.