

Directe composiet restauraties met CLEARFIL™ S3 BOND PLUS

Benodigde materialen



Standaard procedure

Prepareren

- 1 Prepareer de caviteit op de gebruikelijke wijze en verwijder al het geïnfecteerde dentine met behulp van CARIES DETECTOR.
- 2 Indien de mogelijkheid bestaat dat de bonding over ongeprepareerd glazuur verspreid wordt, ets dan het glazuur gedurende 10 seconden, spoel met water en droog daarna.

Aanbrengen van CLEARFIL™ S3 BOND

- 3 Breng de BOND aan op de gehele cavitetswand met een wegwerpkwastje. Laat de BOND 10 seconden

inwerken.

- 4 Blaas het oppervlak langer dan 5 seconden met een milde luchtstroom droog.

- 5 Polymeriseer de BOND gedurende 10 seconden met een polymerisatielamp.

Afwerken

- 6 Breng het gewenste composiet aan, bijvoorbeeld CLEARFIL MAJESTY™ Esthetic of CLEARFIL MAJESTY™ Posterior (volg de gebruiksaanwijzing van het desbetreffende composiet), fotopolymeriseer en werk af.