

Sealen van caviteiten als voorbehandeling van indirecte restauraties met CLEARFIL™ S3 BOND PLUS

Benodigde materialen



Standaard procedure

Prepareren

- 1 Prepareer de caviteit op de gebruikelijke wijze en verwijder al het geïnfecteerde dentine met behulp van CARIES DETECTOR.
- 2 Indien de mogelijkheid bestaat dat de bonding over ongeprepareerd glazuur verspreid wordt, ets dan het glazuur gedurende 10 seconden, spoel met water en droog daarna.

Aanbrengen van CLEARFIL™ S3 BOND PLUS

- 3 Breng de BOND aan op de gehele caviteitswand met een wegwerpkwastje. Laat de BOND 10 seconden inwerken.
- 4 Blaas het oppervlak langer dan 5 seconden met een milde luchtstroom droog.
- 5 Polymeriseer de BOND gedurende 10 seconden met een polymerisatielamp.
- 6 Breng een dunne laag CLEARFIL™ PROTECT LINER F aan op de tand en belicht het composiet 20 seconden. Verwijder ongepolymersieerd composiet met een met alcohol bevochtigd watje.