

Directe composiet restauraties met CLEARFIL™ SE BOND

Benodigde materialen



Standaard procedure

Prepareren

- 1 Prepareer de caviteit op de gebruikelijke wijze en verwijder al het geïnfecteerde dentine met behulp van CARIES DETECTOR.
- 2 Indien de mogelijkheid bestaat dat de bonding over ongeprepareerd glazuur verspreid wordt, ets dan het glazuur gedurende 10 seconden, spoel met water en droog daarna.

Aanbrengen van CLEARFIL™ SE BOND PRIMER en CLEARFIL™ SE BOND BOND

- 3 Breng PRIMER aan op de gehele cavitetswand met een sponsje of een wegwerpkwastje. Laat de PRIMER 20 seconden inwerken. Verdamp, na 20 seconden inwerken op het tandoppervlak, de vervliegbare ingrediënten

met een zachte, olievrije luchtstroom. De PRIMER niet wegspoelen.

- 4 Breng BOND aan op de gehele cavitetswand met een sponsje of een wegwerpkwastje.
 - 5 Verspreid na aanbrengen de bondinglaag zo egaal mogelijk door middel van een zachte, olie-vrije luchtstroom.
 - 6 Belicht de BOND gedurende 10 seconden.
- ### Afwerken
- 7 Breng het gewenste composiet aan, bijvoorbeeld CLEARFIL MAJESTY™ Esthetic of CLEARFIL MAJESTY™ Posterior (volg de gebruiksaanwijzing van het desbetreffende composiet), fotopolymeriseer en werk af.