

Sealen van caviteiten als voorbehandeling van indirecte restauraties met CLEARFIL™ SE BOND

Benodigde materialen

CLEARFIL™ SE BOND



Standaard procedure

Prepareren

- 1 Prepareer de caviteit op de gebruikelijke wijze en verwijder al het geïnfecteerde dentine met behulp van CARIES DETECTOR.
- 2 Indien de mogelijkheid bestaat dat de bonding over ongeprepareerd glazuur verspreid wordt, ets dan het glazuur gedurende 10 seconden, spoel met water en droog daarna.
- Aanbrengen van CLEARFIL™ SE BOND PRIMER**
- 3 Breng de PRIMER op het oppervlak aan en laat dit gedurende 20 seconden inwerken

- 4 Blaas met een zachte luchtstroom de PRIMER droog.

Aanbrengen van CLEARFIL™ SE BOND BOND

- 5 Breng de BOND aan met een wegwerpkwastje of sponsje
- 6 Verspreid de BOND met een zachte luchtstroom
- 7 Belicht de BOND gedurende 10 seconden
- Afwerken**
- 8 Breng een dunne laag CLEARFIL™ PROTECT LINER F aan en belicht deze 20 seconden.
- 9 Verwijder met een in alcohol gedrenkt watje de ongepolymeriseerde laag kunstthars.