

# Behandeling van blootliggende tandhalzen met CLEARFIL™ SE BOND

## Benodigde materialen

### CLEARFIL™ SE BOND



## Standaard procedure

### Prepareren

- 1 Indien de mogelijkheid bestaat dat de bonding over ongeprepareerd glazuur verspreid wordt, ets dan het glazuur gedurende 10 seconden, spoel met water en droog daarna.

### Aanbrengen van CLEARFIL™ SE BOND PRIMER

- 2 Breng de PRIMER op het oppervlak aan en laat dit gedurende 20 seconden inwerken.
- 3 Blaas zachtjes de PRIMER droog.

### Aanbrengen van CLEARFIL™ SE BOND BOND

- 4 Breng de BOND aan en verspreid deze met een zachte luchtstroom

- 5 Belicht de BOND gedurende 10 seconden

### Afwerken

- 6 Breng een dunne laag CLEARFIL™ PROTECT LINER F aan en belicht deze 20 seconden.

- 7 Verwijder met een in alcohol gedrenkt watje de ongepolymeriseerde laag kunsthar.