

II KLASES OKLUZĀLI-DISTĀLAS KAVITĀTES ATJAUNOŠANA AR KOMPOZĪTA MATERIĀLIEM

CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 CLASSIC UN CLEARFIL MAJESTY™ ES FLOW



DR. ALEKSANDRAS LYZWINSKAS

Klīniskais gadījums

Aleksandra Lyzwinska ir zobārste, kuru īpaši aizrauj estētiskā un adhezīvā zobārstniecība. Uz pierādījumiem balstītas zobārstniecības vadītai, viens no viņas mērķiem ir modernu kompozīta materiālu un adhezīvu izmantošana savā klīniskajā praksē. Papildus savam pamatdarbam, viņa strādā par pasniedzēju un docenti Varšavas Medicīnas universitātes Konservatīvās zobārstniecības un endodontijas katedrā, kas ir viņas *alma mater*.

Šajā klīniskajā gadījumā apskatām pacientu ar apakšžokļa kreisās puses pirmā premolāra okluzāli-distālu kariozu bojājumu. Ārstēšanai tika izvēlēta tiešā restaurācija ar plūstošā un augstas viskozitātes blīvējamā kompozīta materiāla kombināciju (CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow, CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 Classic A2).



1. att.

Sākotnējā klīniskā situācija.



2. att.

Premolārs pēc kariesa izurbšanas.



3. att.

Sekcionālās matricas ievietošana anatomiskās formas izveidošanai, cieša apmēsimā kontakta nodrošināšanai un blakus esošā zoba aizsardzībai.



4. att.

Zoba virsma pēc selektīvas emaljas kodināšanas.



5. att.

Interproksimālā siena, kas veidota ar CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 Classic (A2 tonis) un okluzālā kavitāte pildīta ar CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow - Super Low A2.



6. att.

Pēc primārās apstrādes.



GALA REZULTĀTS

7. att.

Ārstēšanas rezultāts no okluzālā skata pēc apstrādes un pulēšanas.



8. att.

Kontroles vizīte pēc 1 nedēļas.

CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 Classic un CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow super low

APMEKLĒJIET PRODUKTA MĀJASLAPU, LAI LAI UZZINĀTU VAIRĀK

KO JŪS VARAT SAGAIĀDĪT ATRAST MŪSU MĀJASLAPĀ

- ✓ Vispārīgu informāciju par CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 Classic un CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Super Low
- ✓ Pilnu produktu sortimentu
- ✓ Drošības datu lapas



KURARAYNORITAKE.EU