

ECOSISTEMA PANAVIA™

PANAVIA™ 

PANAVIA™ V5

Fuerte y estético

PANAVIA™ Veneer LC

El especialista en carillas

PANAVIA™ SA Cement Universal

Tu cemento cotidiano

BORN IN JAPAN

LA EVOLUCIÓN DE PANAIA™


Todo empezó en 1993, cuando se lanzó al mercado PANAIA™ EX, el primer cemento resina adhesivo que contiene el auténtico monómero adhesivo: dicho monómero hizo posible el uso del cemento resina no solo para intervenciones de cementación general, sino también en situaciones clínicas que presentaban un desafío, incluso con puentes adhesivos.

Desde entonces, la marca PANAIA™ se popularizó rápidamente entre los odontólogos de todo el mundo por su fiable y extraordinaria adhesión a los tejidos dentales y a los metales, gracias precisamente al monómero original MDP de Kuraray Noritake Dental Inc.

Recientemente, la creciente demanda de restauraciones estéticas ha hecho aumentar de forma considerable la difusión de una serie de materiales estéticos que sustituyen el metal, entre ellos el óxido de zirconia tetragonal y cúbico, las cerámicas vítreas y vítreas reforzadas, pero también composites nanohíbridos y cerámicas híbridas.

La evolución tecnológica de PANAIA™ ha sido constante con el objetivo de ofrecer al usuario procedimientos de cementación adhesiva simplificados y universales con una estética excelente y la notable y fiable adhesión a las superficies naturales y a las nuevas superficies artificiales, representadas por los nuevos materiales disponibles en el mercado.

LA HISTORIA PANAIA™

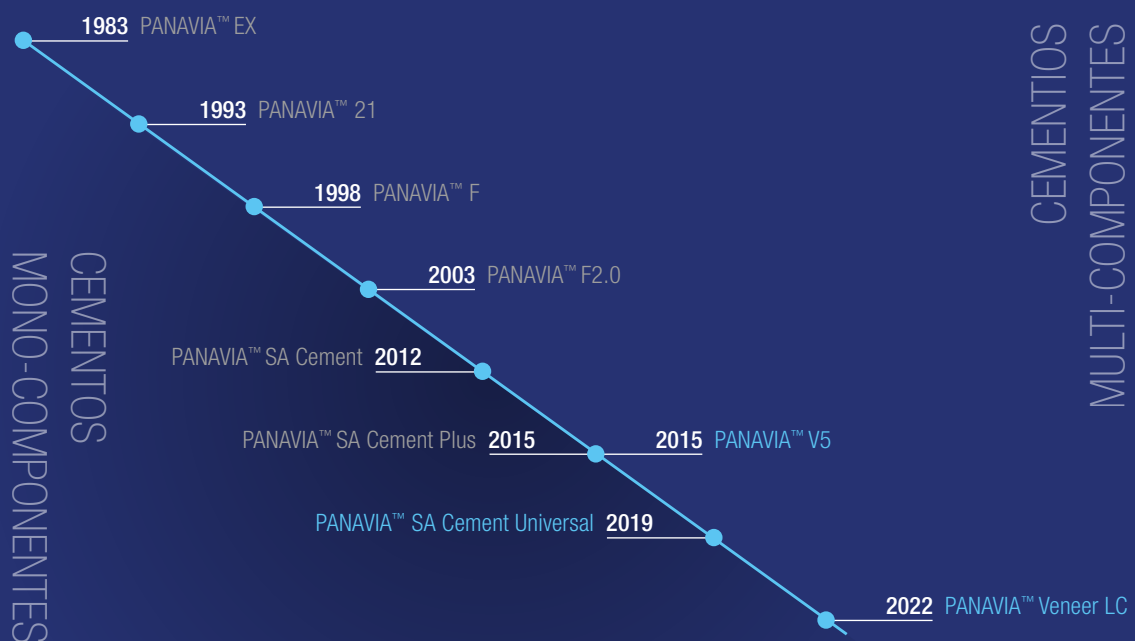

PROCEDIMIENTOS ADHESIVOS SIMPLIFICADOS Y UNIVERSALES


Actualmente, en las restauraciones indirectas, con los materiales modernos sin metales, la adhesión representa un factor clave para el éxito. Todos los materiales se benefician de la cementación adhesiva, ya sea desde el punto de vista mecánico como desde el óptico.

Utilizando la química más sofisticada y desarrollando moléculas innovadoras, nos hemos dedicado al desarrollo de una nueva generación de cementos PANA VIA™ con el objetivo de mejorar constantemente las prestaciones adhesivas, haciendo que los procedimientos operativos sean cada vez más simples y fiables.

Hemos creado PANA VIA™ V5 y PANA VIA™ Veneer LC utilizando tecnologías innovadoras para sistemas de catalizadores sin amina y una nueva estructura esférica de nano-filler. Un solo procedimiento simplificado de imprimación para una nueva facilidad de uso garantiza el éxito de la cementación adhesiva.

Las moléculas integradas en PANA VIA™ SA Cement Universal permiten la adhesión, sin imprimación, no solo en la dentina y esmalte, sino también en todas las superficies protésicas.

El procedimiento universal cambia para siempre el tradicional enfoque de la cementación.

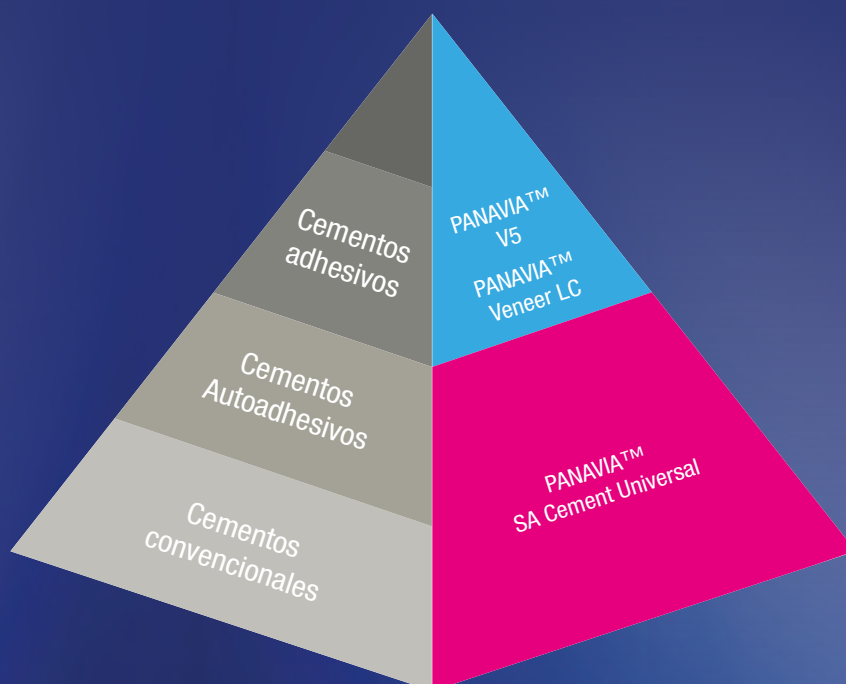

TRES ES EL NÚMERO PERFECTO

Con tres sistemas de cementación diferentes, PANAVIA™ da respuesta de la mejor manera a las distintas situaciones clínicas, garantizando en el contexto las mejores prestaciones en cuando a adhesión y sellado.

PANAVIA™ SA Cement Universal

SELLADO Y ADHESIÓN
EN EL DÍA A DÍA

Cemento autoadhesivo dual que ofrece un sellado y adhesión fuertes y duraderos a todos los materiales de restauración y a las superficies dentales, sin imprimación por separado.

PANAVIA™ V5

FUERTE ADHESIÓN
Y ESTÉTICA

Cemento adhesivo dual de altas prestaciones de adhesión con la tecnología de polimerización más avanzada. Diseñado para restauraciones altamente estéticas.

PANAVIA™ Veneer LC

EL ESPECIALISTA EN
CARILLAS

Cemento adhesivo fotopolimerizable con tiempo de elaboración prolongado, consistencia óptima y fácil eliminación de los excesos.



ECOSISTEMA PANAVIA™

La evolución tecnológica de las resinas adhesivas ha hecho posibles procedimientos adhesivos universales y simplificados, fiables y aplicables en el día a día de la consulta, y para restauraciones de mínima invasión y máxima sofisticación.

El ecosistema PANAVIA™ resuelve todas las exigencias de cementación con componentes únicos integrados entre sí para sustituir la multitud de cementos presentes en la consulta dental.


Con PANAVIA™ SA Cement Universal se obtiene una adhesión duradera a los tejidos dentales y a todos los materiales protésicos sin imprimación. Un procedimiento único universal claro y estandarizado para garantizar excelentes resultados de adhesión, minimizando el riesgo de error.

La arquitectura escalable del ecosistema se completa con dos formulaciones complementarias: PANAVIA™ V5 y PANAVIA™ Veneer LC con características específicas para la cementación adhesiva de restauraciones estéticas.

KATANA™ Cleaner es el único descontaminante universal de uso intraoral y extraoral para garantizar la adhesión también en los casos en los que el control del campo de trabajo representa un factor crítico.

Si crees que ha llegado el momento de cambiar tu enfoque en la cementación con un sistema integrado más eficaz y fiable, el ecosistema PANAVIA™ es lo que estás buscando.

Razonamiento clínico para la elección del sistema de cementación PANAVIA™

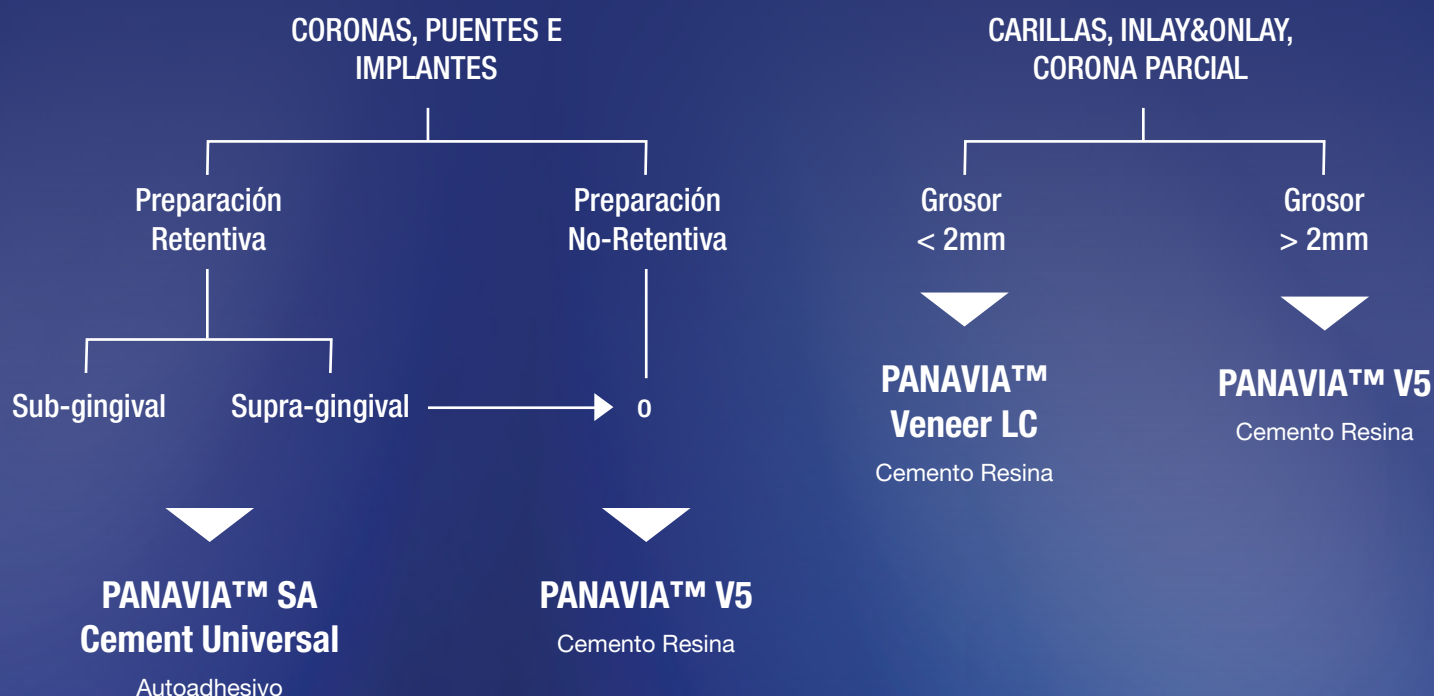

PANAVIA™ SA Cement Universal

**ADHESIÓN A LA ZIRCONIA, AL DISILICATO,
AL COMPOSITE Y A LOS METALES.
SIN IMPRIMACIÓN. EN UN SOLO PASO.**




Es el único cemento resina autoadhesivo que contiene el exclusivo silano LCSi, que se adhiere a cualquier material, incluida la vitrocerámica, sin la necesidad de imprimación por separado.

Gracias a este original monómero LCSi, el cemento proporciona una adhesión química fuerte y duradera a la cerámica, al disilicato de litio y a la resina compuesta.

El monómero original MDP, presente también en la pasta, permite la reacción química con zirconia, dentina, esmalte y aleaciones de metal.

PANAVIA™ SA Cement Universal es por tanto el cemento ideal para los procedimientos cotidianos, como la cementación de coronas y puentes, ya sean en zirconia, disilicato de litio, cerámica híbrida o incluso en metal.

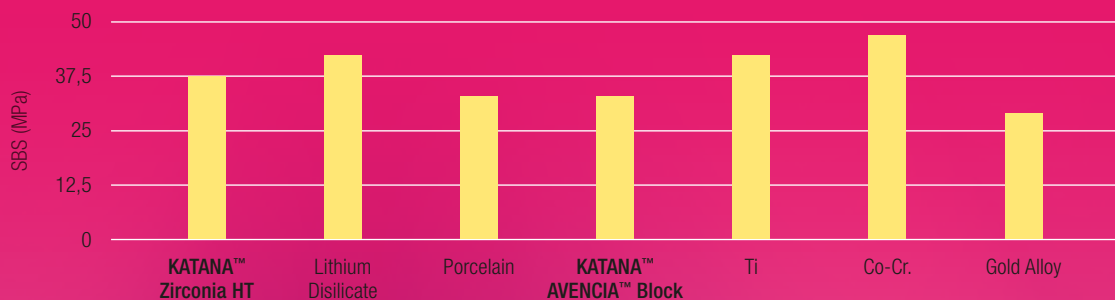

Fuente: Kuraray Noritake Dental Inc.

TECNOLOGÍAS

La innovadora tecnología de monómeros LCSi, en forma de un agente de acoplamiento de silano de cadena larga de carbono patentado, crea uniones con cerámica vítrea, disilicato de litio, cerámica híbrida y resina compuesta.

El monómero MDP original permite la unión química con óxido de circonio, metal, dentina y esmalte.



CEMENTACIÓN FIABLE, FÁCIL Y RÁPIDA

La adhesión fiable y la extraordinaria facilidad de uso hacen de PANAVIA™ SA Cement Universal el cemento autoadhesivo preferido en la práctica diaria de los odontólogos que saben que pueden confiar en el rendimiento adhesivo probado de PANAVIA™ para la cementación de coronas y puentes, inlays onlays, pilares y puentes adhesivos.

La tecnología de PANAVIA™ SA Cement Universal no solo garantiza un alto rendimiento adhesivo, sino que también reduce significativamente los costes de cementación. De hecho, los monómeros adhesivos integrados en el cemento (10-MDP original y silano LCSi) evitan los costes adicionales de imprimaciones o adhesivos por separado.

Pero eso no es todo. Además del cómodo y probado sistema autodosificador Automix, que utiliza una punta mezcladora, PANAVIA™ SA Cemento Universal también está disponible en una versión autodosificadora Handmix para la mezcla manual sobre una hoja. Esta solución elimina por completo los residuos de cemento en la punta de mezcla.

Gracias al sistema de automezclado Handmix, la tecnología adhesiva más avanzada de PANAVIA™ SA Cement Universal también resulta muy rentable.

**¡UNA OPCIÓN MÁS!
MIRA EL VÍDEO SOBRE
LA MEZCLA MANUAL
DE PANAVIA™ SA
Cement Universal**



**DESCUBRE, EN SOLO 90 SEGUNDOS, LOS PROCEDIMIENTOS DE CEMENTACIÓN
RÁPIDOS Y FIABLES CON PANAVIA™ SA CEMENT UNIVERSAL**

**CORONAS Y
PUENTES**

Zirconia y
composite

**CORONAS Y
PUENTES**

Disilicato

**CORONAS Y
PUENTES**

Metal

**PILARES Y
MUÑONES**

Pilares de fibra


BOOST IT! MÁS ADHESIÓN A LA DENTINA

CLEARFIL™ Universal Bond Quick 2 puede utilizarse sobre la estructura dental para aumentar la fuerza de adhesión de PANAVIA™ SA Cement Universal en casos de preparaciones con retención limitada. Esta combinación no requiere fotopolimerización del adhesivo, gracias a la tecnología touch-cure consistente en un sofisticado sistema catalizador compartido en las formulaciones de PANAVIA™ Cement y CLEARFIL™ Adhesive.

PANAVIA™ SA Cement Universal es, por tanto, un cemento con un doble mecanismo de adhesión, autoadhesivo y adhesivo (cuando se utiliza en combinación con CLEARFIL™ Universal Bond Quick 2). PANAVIA™ SA Cement Universal, gracias a la eficaz integración con CLEARFIL™ Universal Bond Quick 2, cubre tanto las indicaciones autoadhesivas como las adhesivas, eliminando los problemas y la confusión que a menudo genera la necesidad de utilizar varios cementos compuestos, imprimaciones y adhesivos.

Cemento y adhesivos universales: solo dos componentes del ecosistema PANAVIA™ perfectamente integrado que puede satisfacer casi cualquier necesidad de cementación. Para la clínica dental, esto significa reducir el número de cementos a uno solo y disponer de procedimientos claros y estandarizados, minimizando el riesgo de error.

La tecnología adhesiva más avanzada es ahora también rentable, ahorrando dinero, ahorrando tiempo y reduciendo las existencias de producto, gracias también a la versión Handmix, con su práctico dispositivo de automezclado para la mezcla manual.

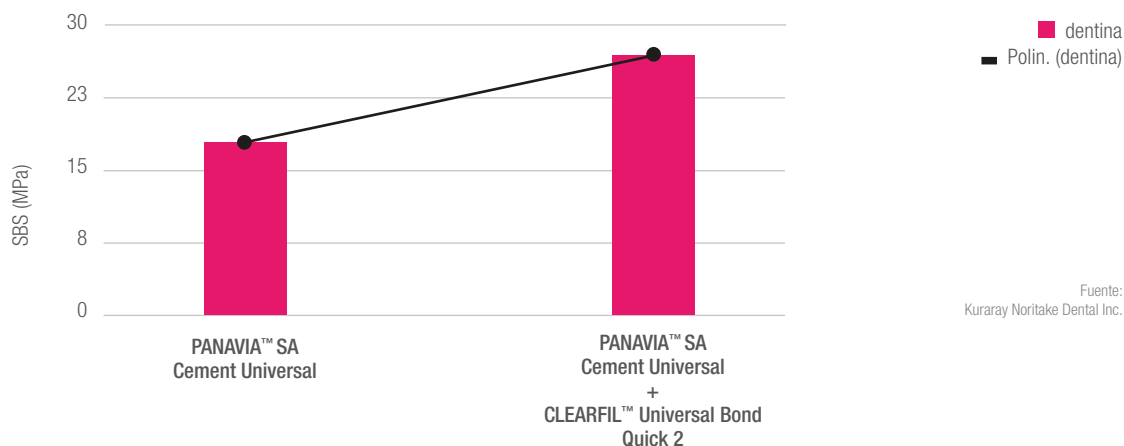

AUTOADHESIVA. HÍBRIDA. ADHESIVA. TRES OPCIONES DE CEMENTACIÓN

PANAVIA™ SA Cement Universal cubre las indicaciones tanto autoadhesivas como adhesivas.

Será, por tanto, la situación clínica concreta la que guiará tu elección de la cementación que no será necesario un cemento diferente, sino la simple adición del adhesivo CLEARFIL™ Universal Bond Quick 2, diseñado para interactuar con los catalizadores del cemento.

La combinación con el adhesivo CLEARFIL™ aumenta aún más la fuerza de adhesión a la dentina y al esmalte; viceversa, el uso sobre las superficies protésicas no es útil.

OPCIONES ADHESIVAS	TIPO DE RESTAURACIÓN	SUGERENCIAS
Autoadhesivo	Coronas, puentes y pilares	-
Autoadhesivo + adhesivo	Coronas, puentes y pilares con poca retención	Con prep. de margen subgingival, aplicar adhesivo distante del margen gingival
Autoadhesivo + adhesivo	Inlay, onlay	Posibilidad de grabado selectivo del esmalte, sellado inmediato de la dentina
Autoadhesivo + adhesivo	Table top, puentes adhesivos	Grabado total-etch del esmalte

DESCUBRIR LAS LÍNEAS GUÍA DE CEMENTACIÓN



KATANA™ Cleaner

EL DESCONTAMINANTE UNIVERSAL QUE ELIMINA LA CONTAMINACIÓN MEJORANDO LOS PROCEDIMIENTOS DE ADHESIÓN.

KATANA™ Cleaner tiene un efecto limpiador elevado, gracias a la actividad superficial de la sal MDP que, combinado con una amina especial, elimina completamente las proteínas presentes en la saliva y en la sangre.

A diferencia de los otros limpiadores, KATANA™ Cleaner tiene un valor de pH de 4.5¹ que permite usar el producto tanto intraoralmente sobre la estructura del diente como extraoralmente, sobre la estructura protésica.

1. Método de medición: JIS Z 8802:2011




CÓMO FUNCIONA



DESCONTAMINACIÓN UNIVERSAL INTRA Y EXTRAORAL

Un estudio detallado de PUBMED, Cochrane Library, Google Scholar y Web of Science, realizado para identificar las publicaciones sobre la contaminación salivar y sobre los materiales adhesivos dentales desde el 1990 al 2017 (marzo), ha dado como resultado un total de 6.202 publicaciones identificadas en internet.

La contaminación salivar durante los procedimientos adhesivos de restauración resulta ser estadísticamente del 64,6 %. KATANA™ Cleaner es la solución que puede eliminar la contaminación de las superficies de forma eficaz, y por tanto, mejorar los resultados adhesivos.

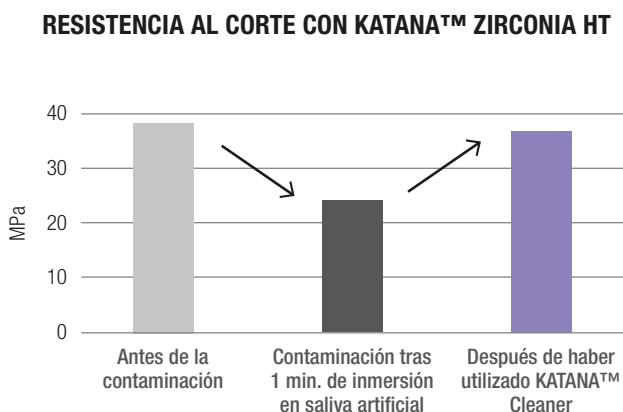

Condiciones de medición:

Superficie del sustrato:

Después del lijado #1000, chorro de arena con alúmina.

Área de cobertura Ø 5 mm, medida a 37°C en almacenamiento subacuático durante 1 día.

Cemento: PANAVIA™ V5

Fuente de los datos: Kuraray Noritake Dental Inc.

Los valores numéricos varían en función de las condiciones de medición.

*Fucong T. et al., Effectiveness of different cleaning measures on the bonding of resin cement to saliva-contaminated or blood-contaminated zirconia, J Dent. 2022 Mar 3;120:104084.

Taiseer A., et al., Cleaning Zirconia Surface Prior To Bonding: A Comparative Study of Different Methods and Solutions, J Prosthodont. 2022 Mar;31(3):239-244. Fucong T., et al., Effects of dentin surface cleaning on bonding of a self-etch adhesive to root canal sealer-contaminated dentine, J Dent. 2021 Sep; 112: 103766.

VENTAJAS E INDICACIONES DE USO

VENTAJAS

- ✓ Uso en preparaciones e interfaces protésicas
- ✓ Procedimiento rápido: frotar en 10 segundos, aclarar y secar
- ✓ Eficacia probada, bien documentada por universidades

INDICACIONES

- ✓ Limpieza de restauraciones contaminadas tras la prueba intraoral
- ✓ Limpieza del diente preparado contaminado


PANAVIA™ V5

HA NACIDO UNA NUEVA TECNOLOGÍA EN EL CAMPO DE LOS SISTEMAS CATALIZADORES

El desarrollo de PANAVIA™ V5 ha durado 10 años y en la actualidad, gracias a los investigadores de todo el mundo, es posible conocer y apreciar sus extraordinarios resultados. Los datos independientes sobre la fuerza y la estética de PANAVIA™ V5 demuestran lo extraordinario de nuestro revolucionario cemento.



ESTABILIDAD CROMÁTICA^{1,2}

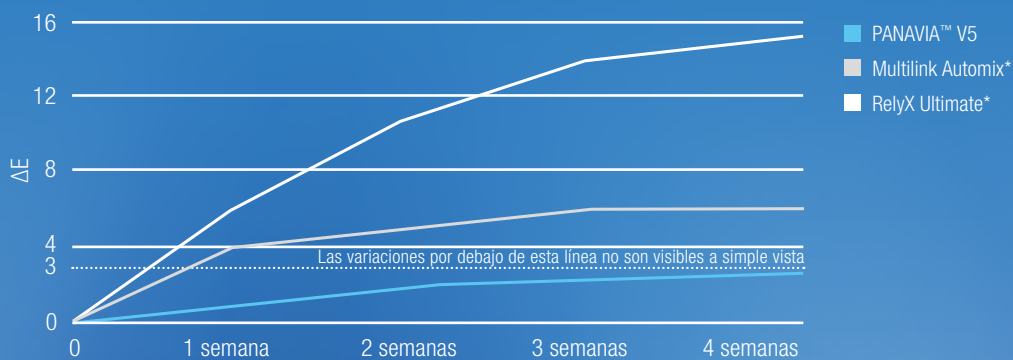

TECNOLOGÍAS

El monómero MDP original permite obtener una adhesión química con zirconia, metal, dentina y esmalte.



LOS SECRETOS DE LAS PRESTACIONES DE PANAVIA™ V5

PANAVIA™ V5 es la primera resina adhesiva con una única imprimación para el diente.


Gracias a su exclusiva formulación, se obtiene una adhesión similar a la del adhesivo CLEARFIL™ SE BOND que, como todos saben, se considera el “Gold Standard” de la adhesión self-etching.

El proceso de polimerización se desencadena cuando nuestro cemento entra en contacto con PANAVIA™ V5 Tooth Primer. A esto lo llamamos «polimerización por contacto». Este invento exclusivo de Kuraray Noritake Dental garantiza un grado muy alto de polimerización del cemento y, por tanto, una gran adhesión.

El monómero 10-MDP presente en PANAVIA™ V5 Tooth Primer y CLEARFIL™ CERAMIC PRIMER PLUS garantiza una adhesión muy fuerte tanto a la restauración protésica como al diente, permitiendo así alcanzar los valores de adhesión más altos jamás conseguidos. Los cementos de resina convencionales tienden a decolorarse con el tiempo debido a la presencia de aminas en sus formulaciones. En PANAVIA™ V5 hemos excluido el uso de aminas.

La calidad estética de tus restauraciones sin metal cementadas con PANAVIA™ V5 seguirá inalterada en el tiempo.

FUERZA DE ADHESIÓN TENSORA SOBRE DENTINA BOVINA ¹

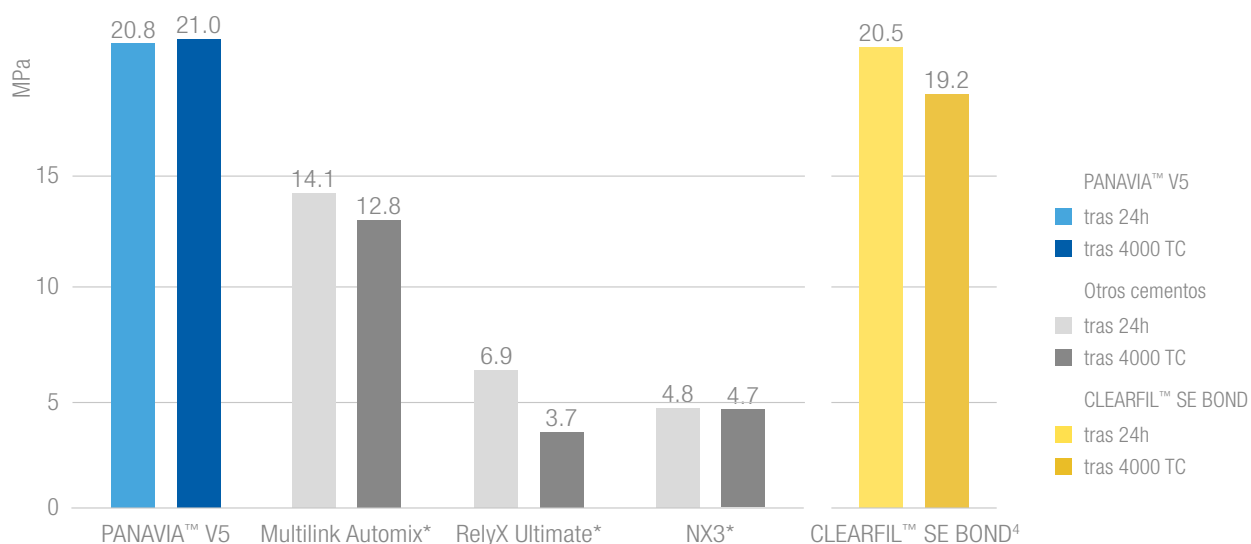

¹Fuente: Kuraray Noritake Dental Inc. ²La muestra se sumergió en agua a una temperatura de 70 °C.

³Imagen SEM: cortesía de N. Nagaoka y K. Yoshihara, Okayama Univ. Japón.

⁴El mejor adhesivo CLEARFIL™ SE BOND se prueba con CLEARFIL™ AP-X y suele utilizarse científicamente como modelo de control para adhesivos.

*Marca no perteneciente a Kuraray Co., Ltd.

EL MONÓMERO ORIGINAL 10-MDP. CUARENTA AÑOS DE KNOW-HOW PRODUCTIVO.

Kuraray Noritake Dental inventó el monómero 10-MDP original en 1981 para mejorar la fuerza de adhesión a la hidroxiapatita (HAp). PANAVIA™ EX, el primer cemento de doble acción con 10-MDP, se lanzó dos años más tarde: así comenzó la larga historia del cemento PANAVIA™.


Cada gota de PANAVIA™ V5 Tooth Primer contiene un billón de moléculas activas MDP originales que crean una unión duradera con hidroxiapatita, metales, composites y óxido de circonio. Un hito en la odontología, el monómero MDP es también el ingrediente secreto de CLEARFIL™ CERAMIC PRIMER PLUS. Recientemente, este monómero también ha sido adoptado por otros fabricantes.



Sin embargo, el monómero 10-MDP es un componente difícil y complejo de producir, especialmente cuando se intenta replicar la extraordinaria mezcla 10-MDP (véase el gráfico a continuación). Kuraray Noritake cuenta con unos conocimientos técnicos únicos y una larga experiencia, por lo que no todas las mezclas MDP garantizan soluciones duraderas.

Nuestro monómero original 10-MDP sigue siendo el mejor aglutinante de hidroxiapatita¹.

FUERZA MICROTENSORA DE ADHESIÓN A LA DENTINA¹

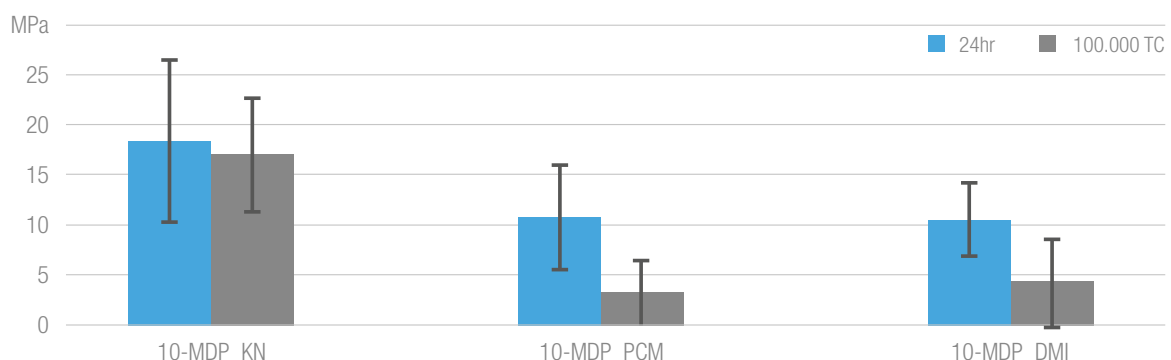

¹ Los 3 self-etch experimentales se han preparado con un 15 % en peso de 10-MDP suministrado por diferentes fuentes: KN (Kuraray Noritake Dental), PCM (Alemania) o DMI (Designer molecules Inc., EE.UU.). Fuente de los datos: Yoshihara K, Nagaoka N, Okihara T, Kuroboshi M, Hayakawa S, Maruo Y, Nishigawa G, De Munck J, Yoshida Y, Van Meerbeek B. Functional monomer impurity affects adhesive performance. Dent Mater. 2015 Dec;31(12):1493-501.

PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO, ÉXITO ASEGURADO

La facilidad de uso de PANAVIA™ V5 garantizará el éxito de tu cementación.

Trata la superficie de la restauración y aplica CLEARFIL™ CERAMIC PRIMER PLUS⁽¹⁾. Aplica PANAVIA™ V5 Tooth Primer en el diente⁽²⁾. Aplica la pasta automezclada de PANAVIA™ V5 sobre la restauración⁽³⁾.

PANAVIA™ V5 está disponible en cinco bellísimos colores. Gracias a su óptima consistencia, este cemento consentirá posicionar tu restauración de forma exacta y precisa. Posteriormente podrás eliminar el exceso de cemento en poquísimos segundos. Al final, no falta más que fotopolimerizar la pasta PANAVIA™ V5 para crear una retención perfecta y duradera. Cinco componentes perfectamente integrados entre sí: ¡éxito asegurado!



DESCUBRIR LOS PROCEDIMIENTOS DE CEMENTACIÓN CON PANAVIA™ V5

CORONAS Y PUENTES	CORONAS	INLAY, ONLAY
Zirconia y composite	Disilicato	Disilicato o composite

PANAVIA™ Veneer LC

EL ESPECIALISTA EN CARILLAS.

**EN LA CEMENTACIÓN DE RESTAURACIONES ESTÉTICAS PARCIALES,
ES NECESARIO EL CONTROL TOTAL, UN TIEMPO DE EXPOSICIÓN PROLONGADO Y
UNA ELEVADA RESISTENCIA Y ESTABILIDAD DE LA ADHESIÓN EN EL TIEMPO.**

Para satisfacer estos requisitos, Kuraray Noritake Dental Inc. ha desarrollado PANAVIA™ Veneer LC que integra la tecnología de polimerización por contacto (Touch-cure Technology) ya adoptada en el cemento dual PANAVIA™ V5.



TECNOLOGÍAS

El monómero MDP original permite obtener una adhesión con zirconia, metal, dentina y esmalte.



MANIPULACIÓN EXCLUSIVA, RELLENOS ESFÉRICOS DE ALTA GAMA

PANAVIA™ Veneer LC es un cemento resina fotopolimerizable dotado de una óptima estabilidad en condiciones de luz ambiental que permite un tiempo de elaboración de 200 segundos *.

CONSISTENCIA IDEAL

Gracias a los nuevos rellenos esféricos de silicona que contiene, el cemento permanece en el lugar donde se ha aplicado, pero conserva la fluidez necesaria para que la carilla se coloque correcta y suavemente sobre el diente, sin desplazarse ni deslizar hacia abajo.

ANTIADHERENTE

PANAVIA™ Veneer LC tiene una consistencia ideal para una aplicación segura y controlada, gracias a la tecnología de nano-relleno.

ELIMINACIÓN FÁCIL DE LOS EXCESOS

El cemento en exceso puede ser fácilmente retirado por completo de una sola vez con un espéculo, tras 1 segundo de pre-polimerización con la lámpara.

200 SEGUNDOS
TIEMPO DE
ELABORACIÓN*

*Tiempo de elaboración con luz ambiental (8000 lux.): 200 segundos.

PANAVIA™ V5 Tooth Primer es la imprimación autograbante para dentina y esmalte que sella perfectamente la superficie de contacto entre el adhesivo y el diente en cuanto se aplica PANAVIA™ Veneer LC Paste. Este sistema de polimerización por contacto activa la polimerización exclusivamente en la superficie de adhesión, creando una fuerte unión con el esmalte y la dentina sin interferir en la reacción de polimerización del cemento.

El uso de CLEARFIL™ CERAMIC PRIMER PLUS ofrece una alta fuerza de adhesión al material restaurador.

La alta estabilidad del color es probablemente la característica más importante para un rendimiento estético duradero. La estabilidad adecuada es posible gracias a una formulación bien equilibrada y a la tecnología de curado por contacto. El reducido grosor de la película y la excelente capacidad de pulido permiten la creación de márgenes regulares y uniformes.

CUATRO COLORES ALTAMENTE ESTÉTICOS

Cuatro colores cuidadosamente seleccionados, de una estabilidad y resistencia excepcionales, aptos para las distintas exigencias individuales, permiten obtener resultados estéticos que duran en el tiempo.

La disponibilidad de pastas de prueba (try-in paste compartidas con el sistema de PANAVIA™ V5) facilita la elección de la tonalidad cromática adecuada.



Universal (A2)
(para todos los casos)



Clear
(mayor translucidez)



Brown (A4)
(más croma)



White
(más valor)

INDICACIONES

- ✓ Cementación definitiva de carillas
- ✓ Cementación definitiva de Inlay y Onlay < 2 mm



DESCUBRIR EL PROCEDIMIENTO DE CEMENTACIÓN CON PANAVIA™ VENEER LC

CARILLAS

Cerámica,
Disilicato

ECOSISTEMA PANAVIA™: INTEGRADO Y ESCALABLE

El ecosistema PANAVIA™ aborda todas sus necesidades de cementación con componentes individuales e integrados que satisfacen todas las opciones clínicas.

Preferencias individuales y diferentes necesidades específicas: estamos convencidos de que elegir uno de los dos enfoques de PANAVIA™ («Cementación universal» y «Adhesión simplificada»), o su combinación, garantiza el mejor rendimiento adhesivo y de sellado marginal con procedimientos claros y estandarizados.

1. CEMENTACIÓN UNIVERSAL

Solo con PANAVIA™ SA Cement Universal se consigue una adhesión duradera al tejido dental y a todos los materiales protésicos sin necesidad de imprimación. Un procedimiento universal estandarizado garantiza un alto rendimiento de adhesión al tiempo que minimiza el riesgo de errores.

En el día a día, también es una elección rentable gracias a la versión de mezcla manual, que no produce residuos de cemento.

Se trata de un avance significativo en comparación con los cementos convencionales de base ácida y los cementos autoadhesivos de la generación anterior.

Además, PANAVIA™ SA Cement Universal cubre tanto las indicaciones autoadhesivas como las adhesivas cuando se combina con CLEARFIL™ Universal Bond Quick 2: cuando se necesita una adhesión más fuerte a la dentina, ya no es necesario un cemento adhesivo adicional.

Puede confiar en el KATANATM Cleaner cuando la gestión de la contaminación del campo quirúrgico sea un problema que no pueda gestionarse con las técnicas convencionales: gracias a su pH neutro de 4,5, puede utilizarse no solo extraoralmente, sino también intraoralmente.

Componentes aconsejados

#4212-EU PANAVIA™ SA Cement Universal Automix (Universal (A2))

#4202-EU PANAVIA™ SA Cement Universal Handmix (Universal (A2))

#4203-EU PANAVIA™ SA Cement Universal Handmix (White)

#4042-EU CLEARFIL™ Universal Bond Quick 2 Refill

#3970-EU KATANATM Cleaner



2. ADHESIÓN SIMPLIFICADA

La arquitectura escalable del ecosistema incluye PANAVIA™ V5 y PANAVIA™ Veneer LC con características específicas para la cementación adhesiva de restauraciones estéticas.

Hemos creado estos dos cementos utilizando tecnologías innovadoras con catalizadores sin aminas y una nueva estructura esférica de nanorrelleno.

PANAVIA™ V5 y PANAVIA™ Veneer LC comparten un procedimiento de imprimación simplificado (Tooth Primer y CLEARFIL™ CERAMIC PRIMER PLUS) los mismos colores de cemento y, en consecuencia, las mismas pastas de prueba.

Ambas incorporan una nueva tecnología en el campo de los sistemas endurecedores que garantiza el máximo rendimiento.

KATANATM Cleaner tiene siempre un papel determinante para alcanzar el éxito clínico de la cementación.



Componentes aconsejados

- #3604-EU PANAVIA™ V5 Introductory Kit (Universal (A2))
- #4505-EU PANAVIA™ Veneer LC Paste (Universal (A2))
- #4212-EU PANAVIA™ SA Cement Universal Automix (Universal (A2))
- #4202-EU PANAVIA™ SA Cement Universal Handmix (Universal (A2))
- #4213-EU PANAVIA™ SA Cement Universal Automix (White)
- #4042-EU CLEARFIL™ Universal Bond Quick 2 Refill
- #3970-EU KATANATM Cleaner

EL RESTO DE PRODUCTOS DE LA GAMA DE CEMENTOS PANAVIA™ INTEGRABLES EN EL ECOSISTEMA, BASADOS EN TUS EXIGENCIAS



PANAVIA™ V5

PANAVIA™ V5 Tooth Primer (4 ml), #3635-EU

CLEARFIL™ CERAMIC PRIMER PLUS (4 ml), #3637-EU

PANAVIA™ V5 Paste (4,6 ml / 8,1 g), 20 Puntas para mezclado

Universal (A2) #3611-EU, Clear #3612-EU, Brown (A4) #3613-EU, White #3614-EU, Opaque #3615-EU

PANAVIA™ V5 Try-in Paste (1,8 ml),

Universal (A2) #3621-EU, Clear #3622-EU,

Brown (A4) #3623-EU, White #3624-EU,

Opaque #3625-EU

K-ETCHANT Syringe (3 ml), 20 Puntas de aguja (E), #3252-EU

20 Puntas para mezclado - #3626-EU

20 Puntas endodónticas (S) - #3629-EU

PANAVIA™ SA Cement Universal



SINGLE PACK AUTOMIX

#4213-EU

#4214-EU

PANAVIA SA Cement Universal Automix (White)

PANAVIA SA Cement Universal Automix (Translucent)

1 jeringa (8,2 g / 4,6 ml); 20 puntas de mezclado



SINGLE PACK HANDMIX

#4204-EU

PANAVIA SA Cement Universal Handmix (Translucent)

1 jeringa por color (9,2 g / 5,0 ml)

PUNTAS DE MEZCLADO

#3391-EU 20 unidades



PUNTAS ENDODÓNTICAS (SS)

#3392-EU 10 unidades



PANAVIA™ Veneer LC



Jeringas (2,6g/1,5ml cad.)

#4505-EU UNIVERSAL (A2)

#4506-EU CLEAR

#4507-EU BROWN (A4)

#4508-EU WHITE

#4513-EU "PANAVIA™ VENEER LC"

APPLICATOR TIP (16G)

TU CEMENTO
COTIDIANO



FUERTE
Y ESTÉTICO



EL ESPECIALISTA
EN CARILLAS



CONTACTO

Kuraray Europe Spain S.L.

Avda. del Tivoli 17, Local 37 y 38
29631 Arroyo de la Miel (Benalmádena), Málaga

Teléfono: 0039 02 63471228

Correo Electrónico: dental-iberia@kuraray.com

Web: www.kuraraynoritake.eu/es



Kuraray Noritake Dental Inc.

1621 Sakazu, Kurashiki, Okayama 710-0801, Japan

Para obtener más información, escanee el código QR:



- Antes de utilizar el producto, se recomienda leer atentamente las instrucciones de uso incluidas en el paquete.
- El fabricante se reserva el derecho de modificar las características y el aspecto del producto sin previo aviso.
- Los colores mostrados en este folleto pueden diferir ligeramente del producto real.

"PANAVIA" y "CLEARFIL" son marcas registradas de KURARAY CO., LTD.
"KATANA" es una marca registrada NORITAKE CO., LTD.



Importado para Europa por:

Kuraray Europe GmbH Philipp-Reis-Strasse 4
65795 Hattersheim am Main, Germany

