

IVENEER®
INJECTABLE MATRIX SYSTEM

INSERISCI. INIETTA. FATTO.

IVENEER
Matrici per iniezione diretta

X

CLEARFIL MAJESTY™
ES Flow Universal Low Composite



kuraray *Noritake*

Distributed by: Kuraray Europe GmbH, BU Medical Products

L'APPROCCIO INNOVATIVO PER FACCETTE ESTETICHE IN COMPOSITO

IVENEER è un sistema di matrici per iniezione diretta (misure SM e ML) progettato per garantire efficienza e facilità d'uso, offrendo risultati costanti e altamente estetici in pochissimo tempo.



Le matrici IVENEER, utilizzate in combinazione con prodotti complementari di Kuraray Noritake Dental Inc., come l'adesivo ad alte prestazioni CLEARFIL™ Universal Bond Quick 2 e il composito fluido altamente caricato CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Universal Low, stabiliscono nuovi standard in termini di ottimizzazione dei flussi di lavoro, precisione e soddisfazione dei pazienti.

PERCHÉ SCEGLIERE IVENEER?

- ▶ Per creare bellissimi sorrisi con rapidità e precisione
- ▶ Per ridurre i costi generali e aumentare i ricavi
- ▶ Per offrire procedure di mock-up ultraveloci
- ▶ Per ottenere risultati predicibili e dall'aspetto naturale

VANTAGGI



Efficienza

Design unico del modello completamente anatomico con un protocollo di applicazione semplificato per restauri anteriori di alta qualità.



Versatilità

Possono essere utilizzate non solo per restauri definitivi, ma anche per mock-up cosmetici, scelta del colore e faccette provvisorie.



Risultati predicibili

Forma e simmetria predefinite per una corretta occlusione e un sorriso armonioso in un'unica seduta.



Risparmio di tempo

Bastano pochi aggiustamenti e una minima lucidatura finali.



Precisione

Matrici numerate per un facile utilizzo e risultati simmetrici e naturali.



AMPIA GAMMA DI INDICAZIONI


Il sistema di matrici IVENEER è progettato per essere utilizzato in una varietà di casi clinici, rendendolo uno strumento versatile in qualsiasi studio dentistico:

- ▶ Applicazioni dirette di faccette in composito
- ▶ Mock-up cosmetici e scelta del colore
- ▶ Provvisori durante la creazione di faccette in ceramica
- ▶ Tutti i restauri di classe III, IV e V
- ▶ Denti disallineati che non richiedono ortodonzia
- ▶ Incisivi laterali conoidi
- ▶ Corone in composito
- ▶ Denti abrasi/consumati
- ▶ Denti scoloriti

SOLUZIONE OTTIMIZZATA CON ATTENZIONE ALL'ESTETICA

Immagini cliniche per gentile concessione del Dr. Luca Alibrandi (Roma)

1. SCELTA DELLA MATRICE

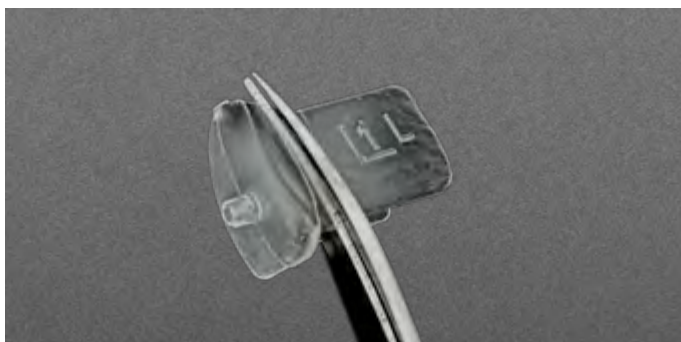

IVENEER

Scegliere la matrice corretta e la misura adeguata dal kit.



2. MORDENZATURA-RISCIACQUO-ASCIUGATURA



K-ETCHANT Syringe

Acido fosforico ad alte prestazioni.



3. APPLICAZIONE DELL'ADESIVO-ASCIUGATURA-FOTOPOLIMERIZZAZIONE



CLEARFIL™ Universal Bond Quick 2

Adesione duratura: dopo l'applicazione non sono necessari tempi di attesa, frizionamenti multipli e applicazione di più strati.



4. INIEZIONE E POLIMERIZZAZIONE



CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Universal Low

Integrazione perfetta. Estetica superiore.




5. FINITURA E LUCIDATURA



TWIST™ DIA for Composite

Per il tocco finale a tutti i restauri in composito

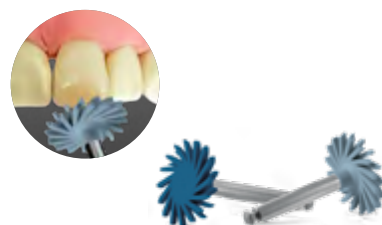

6. RISULTATO DEL TRATTAMENTO



Ogni passaggio. Ogni prodotto.
Un risultato perfetto. A cura di Kuraray Noritake

GAMMA IVENEER

IVENEER

#9005-IP

IVENEER IVEST12S Starter Set
Matrici per iniezione, misura SM,
3 pezzi x: denti 1-2 dx misura SM (Small)
3 pezzi x: denti 1-2 sx misura SM (Small)
12 pezzi in totale



#9002-IP

IVENEER IVEF64 Full Kit S/M+M/L

Orange kit (misura Large):

4 matrici per iniezione, misura ML (Large) forma triangolare arcata superiore, modello per dente:
4 pezzi x: denti 1-2-3-4 dx
4 pezzi x: denti 1-2-3-4 sx
(32 pezzi totali)

Green kit (misura Small):

4 matrici per iniezione, misura SM (Small), forma triangolare arcata superiore, modello per dente:
4 pezzi x: denti 1-2-3-4 dx
4 pezzi x: denti 1-2-3-4 sx
(32 pezzi totali)



COME FUNZIONANO LE IVENEER?

Guarda i video tutorial.

Il codice QR rimanda a video IVENEER relativi esclusivamente ai loro prodotti e procedure. Sono forniti a solo scopo informativo generale e non riguardano materiali né Istruzioni per l'Uso (IFU) Kuraray Noritake Dental. Per informazioni sui nostri prodotti, consultare sempre le IFU ufficiali.



PRODOTTI UNIVERSALI COMPLEMENTARI DI KURARAY NORITAKE

COMPOSITO FLUIDO UNIVERSALE ALTAMENTE CARICATO

CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Universal **Fluidità media**

- #4600-EU CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Universal Low (U)
#4601-EU CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Universal Low (UD)

Fluidità bassa

- #4620-EU CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Universal Super Low (U)
#4621-EU CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Universal Super Low (UD)

Contenuto: 1 siringa (2,7 g/1,5 ml) 15 puntali cad.



CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Puntali ad ago

- #3331-EU 20 puntali ad ago (N)

MORDENZANTE

K-ETCHANT Syringe

- #3252-EU K-ETCHANT Siringa 2 x 3 ml cad., 40 puntali ad ago
#3253-EU 20 puntali ad ago



ADESIVO UNIVERSALE

CLEARFIL™ Universal Bond Quick 2

- #4042-EU CLEARFIL™ Universal Bond Quick 2 flacone (5 ml)



SISTEMA DI LUCIDATURA

TWIST™ DIA for Composite

- #1201-IP Kit introduttivo da 14 mm (6 pezzi)
#1211-IP Kit introduttivo da 10 mm (6 pezzi)



CONTATTI

Kuraray Europe Italia S.r.l
Via G. Boccaccio 21,
20123 Milano, Italia

Telefono 02 63471228
E-Mail dental-italia@kuraray.com
Web www.kuraraynoritake.eu

 facebook.com/KurarayNoritakeInLab
facebook.com/KurarayNoritakeInClinic

 **Kuraray Noritake Dental Inc.**
1621 Sakazu, Kurashiki, Okayama 710-0801, Japan

- Prima di utilizzare questo prodotto, leggere attentamente le istruzioni per l'uso fornite con il prodotto.
- Le specifiche e l'aspetto del prodotto sono soggetti a modifiche senza preavviso.
- Il colore stampato può differire leggermente dal colore reale.

"CLEARFIL" e "CLEARFIL MAJESTY" sono marchi registrati o marchi commerciali di KURARAY CO.
"TWIST" è un marchio commerciale di EVE Ernst Vetter GmbH.



Importatore UE di CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow,
K-ETCHANT Syringe, CLEARFIL™ Universal Bond Quick 2
e sistema di matrici per iniezione IVENEER.

Kuraray Europe GmbH Philipp-Reis-Strasse 4
65795 Hattersheim am Main, Germany

Per il sistema di matrici per iniezione IVENEER:



Ivener Ltd.

Hasadna 1, Patah Tikva 49130
Israel

Per TWIST™ DIA for Composite:



EVE Ernst Vetter GmbH

Neureutstraße 6, 75210 Keltern
Germany

