

Case4

Teleskopický můstek

PROVEDENÍ MINIMÁLNÍ REDUKCE TECHNIKOU CUT-BACK

Vyhovuje po estetické i funkční stránce a díky tenké vrstvě porcelánu dosahuje přirozené barvy a struktury povrchu.

Keisuke Ihara, RDT
Yohei Sato, DMD, PhD
Tsurumi University School of Dental Medicine

Step1 Příprava zubů




Step2 Na abutmenty byly nasazeny vnitřní korunky




Step3 Zirkonová konstrukce (KATANA Zirconia HTML A1) s redukcí technikou cut-back určená pro incizální konstrukci



Step4 Aplikace výrobku Cerabien™ ZR(CZR) pro vytvoření základní barvy a vypalování

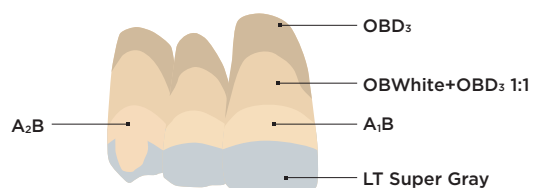

Step5 Aplikace vnitřního barviva a vypalování

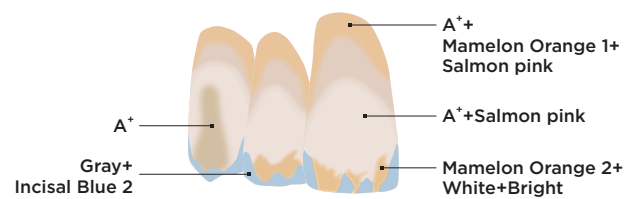

Step6 Konečná náhrada a části vnitřní korunky



Step7 Pooperační pohled



Kuraray Noritake Dental Inc.

300 Higashiyama, Miyoshi-cho, Miyoshi, Aichi 470-0293, Japan

Website www.kuraraynoritake.com

- Před použitím tohoto výrobku si nezapomeňte přečíst návod k použití dodaný s produktem.
- Technické údaje a vzhled výrobku se mohou změnit bez předchozího upozornění.
- Barva tisku se může mírně lišit od skutečné barvy.

„KATANA“ a „CERABIEN“ jsou ochranné známky společnosti NORITAKE CO., LIMITED

IM40-01 05/2020

kuraray

Noritake

KAZUISTIKY

Mikrovrstvení jako nová technika v popředí
KATANA™ Zirconia a CERABIEN™ ZR(CZR)



Kuraray Noritake Dental Inc.

Case1

LINGVÁLNÍ PODPĚRA RÁMOVÉ KONSTRUKCE

Hybridní provedení splňuje funkční požadavky z hlediska nižší abrazivity a vyšší odolnosti.

Autor: Daniele Rondoni

Step1

Zirkonová konstrukce (KATANA Zirconia HTML A2) s redukcí technikou cut-back určená pro napodobení anatomické struktury dentinu a incizální konstrukce



Step2

Aplikace vnitřního barvení




Step3

Dokončení vypalování vnitřního barviva



Step4

Aplikace odstínu Luster, Clear Cervical a Opacious Body

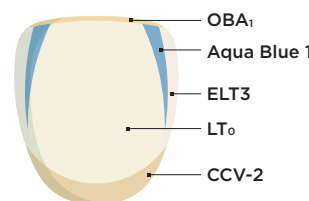

Step5

Dokončení vypalování



Step6

Dokončení vypalování glazury (samoglazurování)



Step7

Leštění lingvální strany



Step8

Pooperační pohled



4 roky po operaci



Case2

RÁMOVÁ KONSTRUKCE BEZ PODPŮRNÉ LINGVÁLNÍ PODPĚRY

Zohlednění různých kritérií pro výběr ideálního provedení zirkonu a konstrukce, které splňují požadovanou úroveň estetiky

Autor: Daniele Rondoni

Step1

Závěrečné přípravy




Step2

Zirkonová konstrukce (KATANA Zirconia STML A2) s redukcí technikou cut-back určená pro napodobení průsvitné incizální oblasti




Step3

Aplikace 1. vnitřního barviva a vypalování

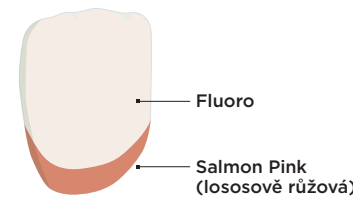


Step4

Aplikace 1. barviva Luster, Clear Cervical a vypalování

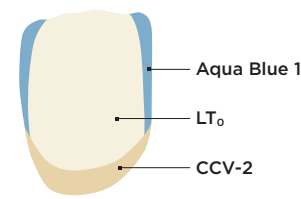


Step5

Aplikace 2. vnitřního barviva a vypalování

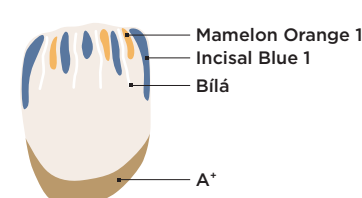

Step6

Aplikace 2. barviva Luster a Opacious Body

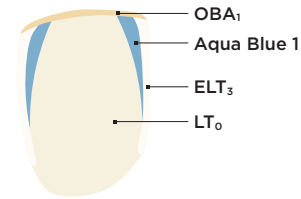

Step7

Dokončení vypalování



Step8

Dokončení morfologické korekce



Step9

Pooperační pohled



Case3

Fixní částečná zubní náhrada nesená implantátem

PROVEDENÍ MINIMÁLNÍ REDUKCE TECHNIKOU CUT-BACK

Vícevrstvý zirkon KATANA mi umožňuje dosáhnout skvělých estetických a funkčních výsledků u rizikových pacientů.

Sung Bin Im, MDC, CDT
Sergio R Arias, DDS, MS


Step1

Na pevný model byly nasazeny titanové abutmenty (č. 7, 9)




Step2

Zirkonová konstrukce (KATANA Zirconia HT10) s redukcí technikou cut-back určená pro napodobení anatomické struktury dentinu a incizální konstrukce

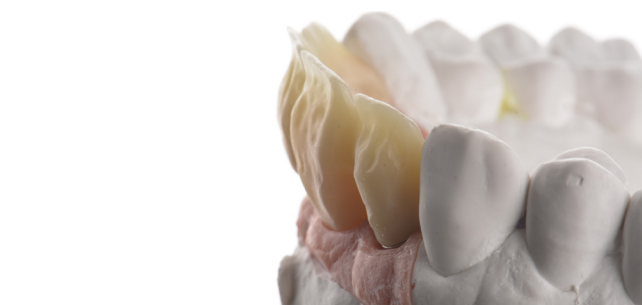


Step3

Aplikace a vypalování výrobku Cerabien™ ZR (CZR) za účelem dosažení cílového odstínu a incizálního efektu

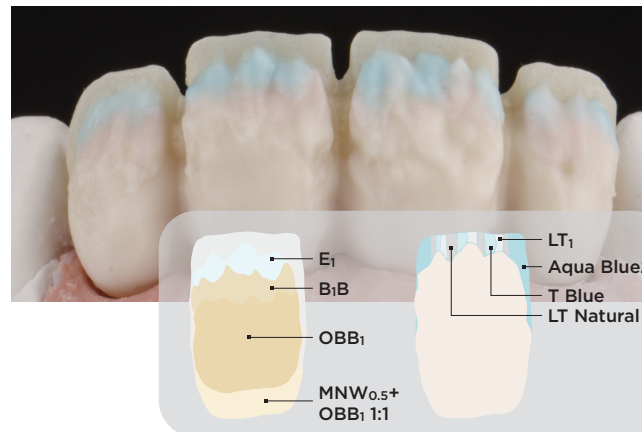


Step4

Dokončení vypalování vnitřního barviva

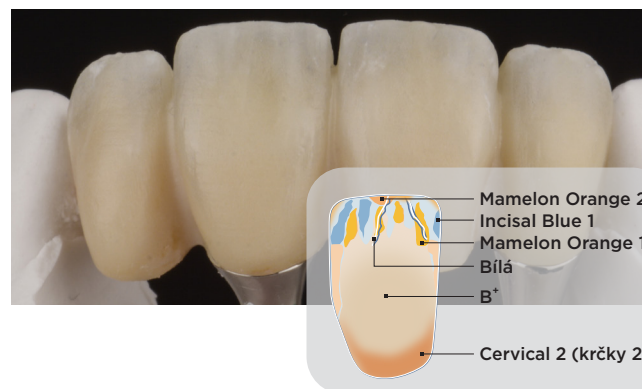

Step5

Dokončení vrstvení odstínu Luster a Clear Cervical

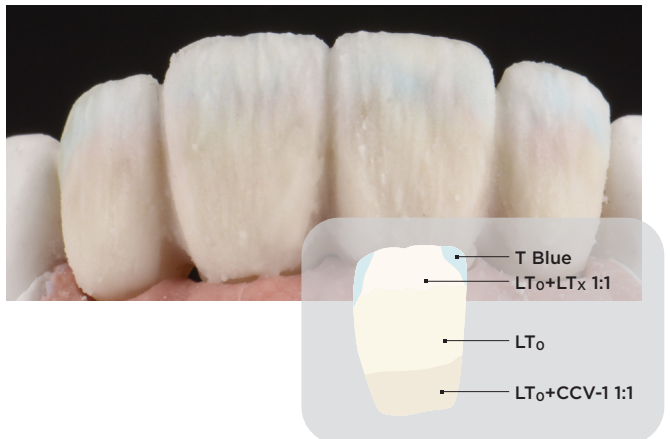

Step6

Podrobná kontrola povrchu



Step7

Pooperační pohled

