

KATANA™ AVENCIA™ Block

L'INNOVATIVO COMPOSITO RINFORZATO CON NANO-CERAMICA,
DISPONIBILE IN BLOCCHETTI

Superfici altamente brillanti e durevoli nel tempo

Innovativa struttura dei riempitivi

Elevate proprietà meccaniche

Cementazione affidabile


Disponibile nella versione CEREC e Universale




L'EQUILIBRIO PERFETTO: PRECISIONE, RESISTENZA, SUPERFICI BRILLANTI

L'INNOVAZIONE DA ABBRACCIARE

KATANA™ AVENCIA™ Block è un nuovo tipo di composito rinforzato con nano-ceramica sviluppato unendo la tecnologia organica/inorganica e l'esperienza che abbiamo maturato in anni di sviluppo e lavoro con i materiali da restauro.

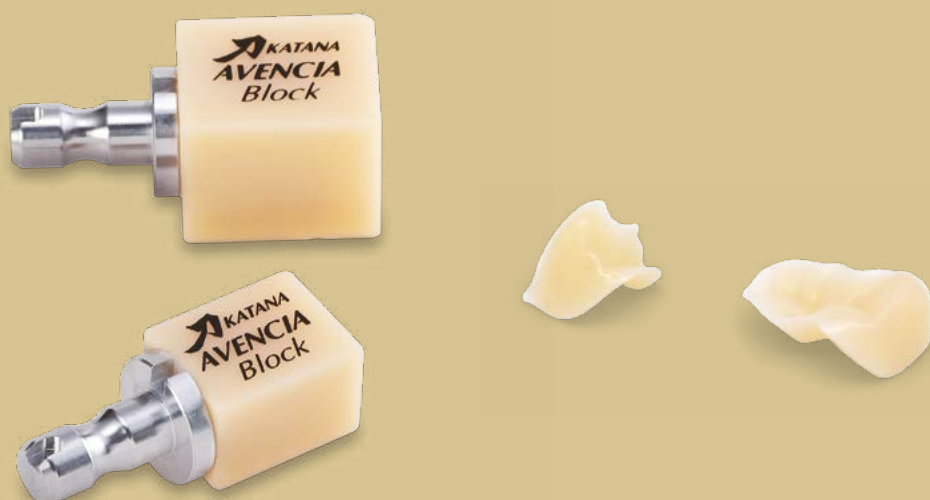

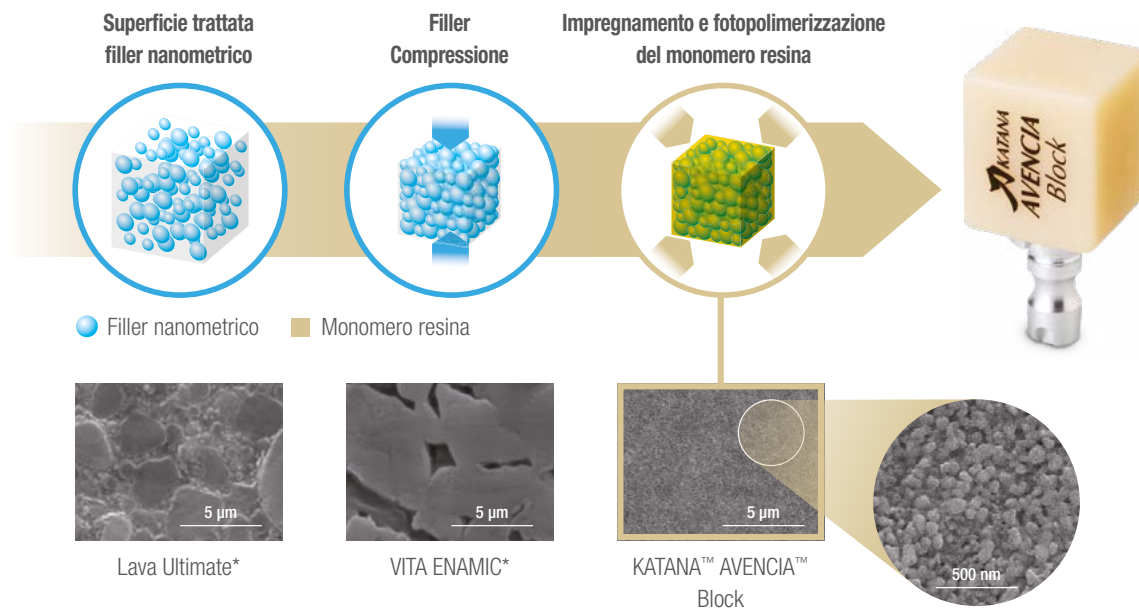

ECCELLENTE LUCIDABILITÀ E DURATA DELLA BRILLANTEZZA NEL TEMPO

Foto di KATANA™ AVENCIA™ Block dopo lucidatura


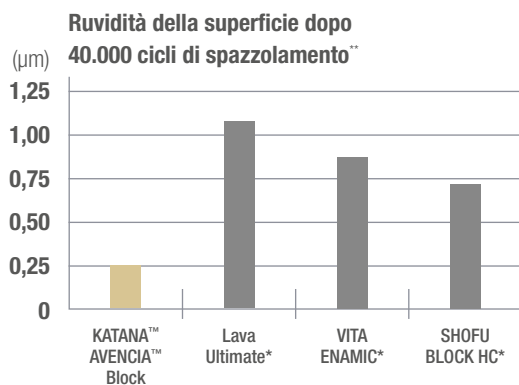


Foto di KATANA™ AVENCIA™ Block prima e dopo 40.000 cicli di spazzolamento

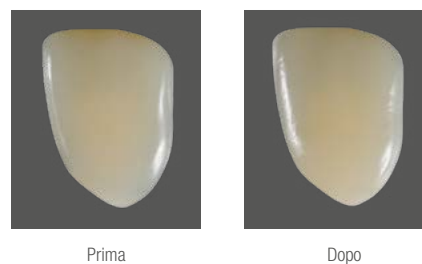


* Non è un marchio di Kuraray Noritake Dental Inc. Fonte: Kuraray Noritake Dental Inc. ** Condizioni di prova: Test di usura da spazzolino con dentifricio. Carica: 250 g. Fonte: Kuraray Noritake Dental Inc. Le foto con microscopio elettronico a scansione (SEM) mostrano la microstruttura di KATANA™ AVENCIA™ Block, rispetto ad altri materiali. KATANA™ AVENCIA™ Block è riempito ad alta densità e in modo uniforme, unicamente con filler nanometrico.

ECCELLENTE RESISTENZA ALL'USURA. DELICATO CON IL DENTE ANTAGONISTA.


1 Eccellente resistenza all'usura

KATANA™ AVENCIA™ Block

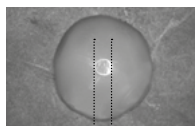

Usura


Lava Ultimate*

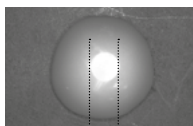

Usura


Usura sui materiali

VITA ENAMIC*

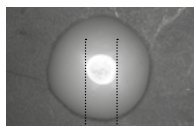


Usura

Test dell'usura

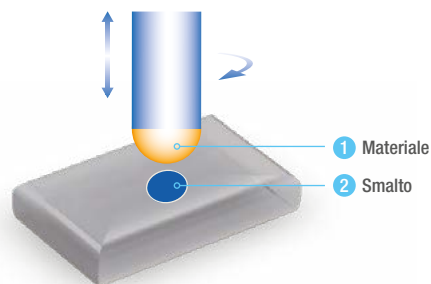


Condizioni di test:
Test dell'usura di Leinfelder a temperatura ambiente in acqua, Carico: 15,6 kg/cm², 10.000 cicli.
Antagonista: smalto bovino, lucidato con carta n. 1000
Materiale: lucidato con carta n. 3000
Fonte: Kuraray Noritake Dental Inc.

2 Delicato con il dente antagonista

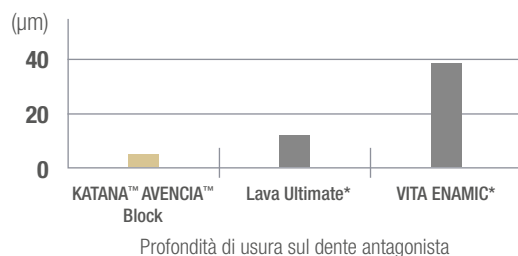


PROPRIETÀ MECCANICHE SUPERIORI

Resistenza alla flessione

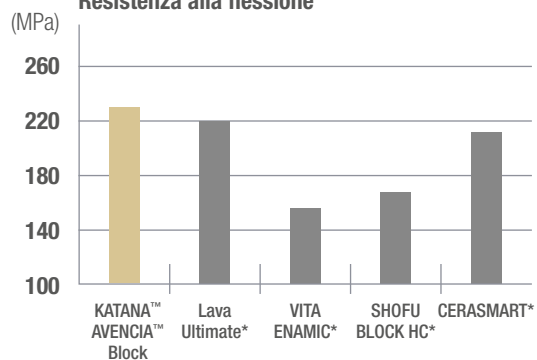

Condizioni di test: ISO 10477

Forza di compressione

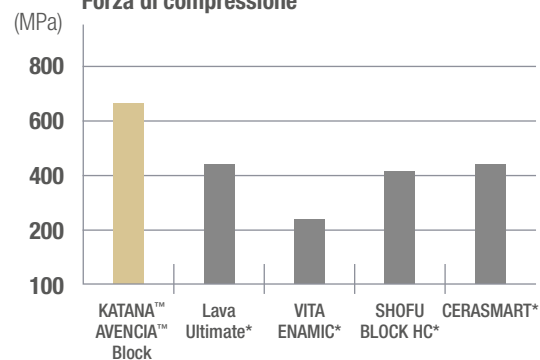

Condizioni di test: Dimensione del campione 3 x 3 x 3 mm, immerso a temperatura ambiente in acqua per 24 ore

INDICAZIONI E APPLICAZIONI CONSIGLIATE




SCELTA DELLA DIMENSIONE E DEL COLORE

Dimensione del blocco


	a (altezza)	b (larghezza)	c (lunghezza)
12	10 mm	12 mm	15 mm
14L	14,5 mm	14,5 mm	18 mm



Mandrino per CEREC

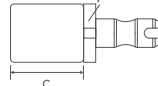


Mandrino UNIVERSALE

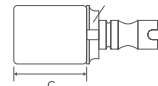

Colori



* Non è un marchio di Kuraray Noritake Dental Inc.
Fonte: Kuraray Noritake Dental Inc.

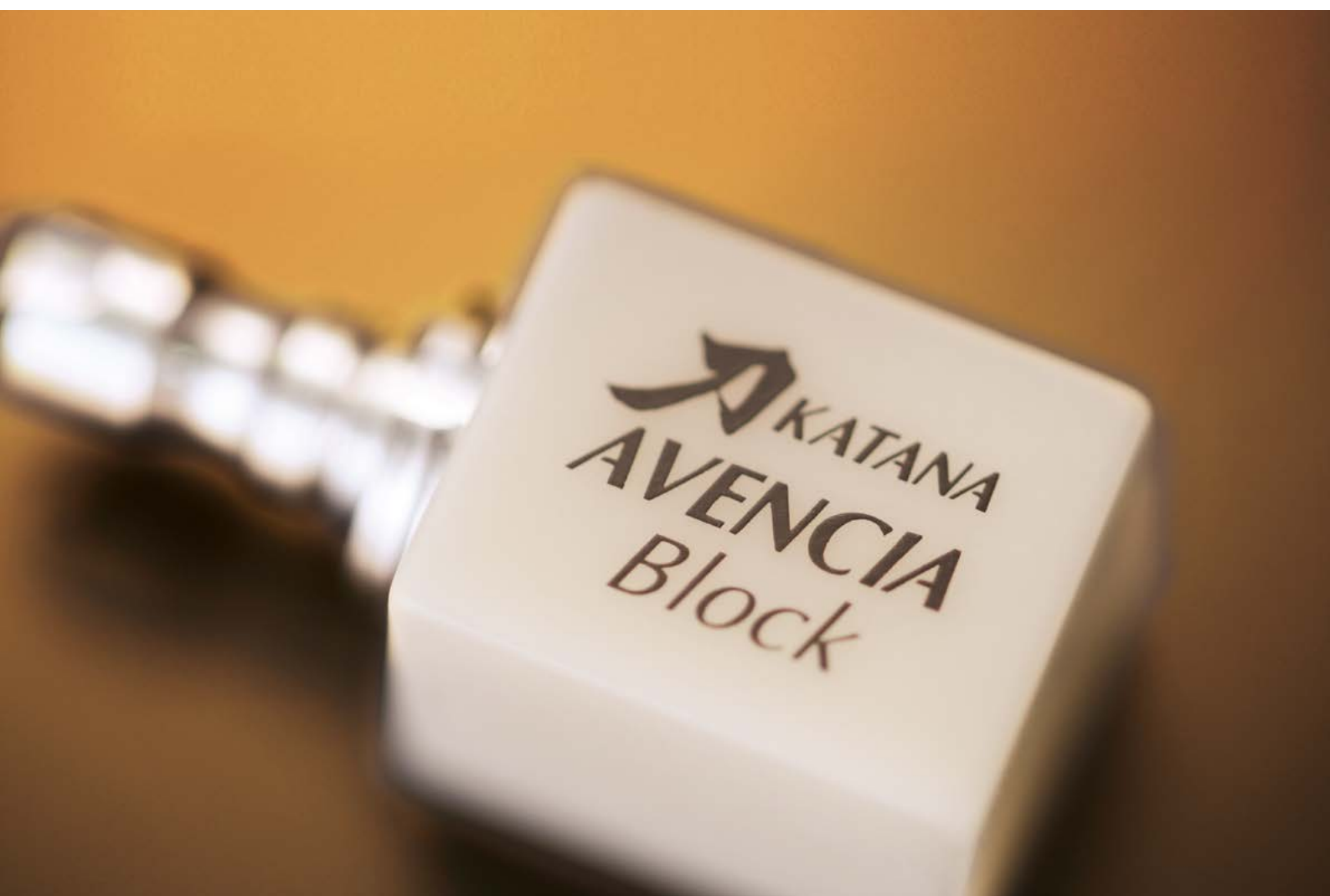

FINITURA

Adesione affidabile con i cementi PANAVIA™

L'adesione affidabile di KATANA™ AVENCIA™ Block si può ottenere con l'utilizzo di PANAVIA™ V5 o PANAVIA™ SA Cement Universal, l'ultimo nato della famiglia PANAVIA™.

PANAVIA™ V5

CLEARFIL™ CERAMIC PRIMER PLUS, utilizzato per il pretrattamento del restauro nel sistema PANAVIA™ V5, contiene il silano yMPS e il monomero MDP. Questo processo chimico lo rende adatto per il pretrattamento dei restauri in composito rinforzato con nano-ceramica, compreso KATANA™ AVENCIA™.



Procedura con PANAVIA™ V5



Sabbiare con polvere di allumina.



Applicare CLEARFIL™ Ceramic Primer Plus e asciugare.



Applicare PANAVIA™ V5 Tooth Primer. Attendere per 20 secondi e asciugare con un getto d'aria leggero.



Applicare PANAVIA™ V5 Paste sulla corona.



Fotopolimerizzare per 3-5 secondi



Rimuovere il cemento in eccesso.

OPPURE



Rimuovere il cemento in eccesso con una spatola.



Fotopolimerizzare il margine e mantenere l'isolamento per 3 minuti.

PANAVIA™ SA Cement Universal

PANAVIA™ SA Cement Universal è un precursore del cemento resina autoadesivo che aderisce a qualsiasi materiale senza la necessità di alcun primer. Il nuovo ed esclusivo silano LCSi, contenuto nella pasta, crea un forte legame chimico con i restauri in composito rinforzato con nano-ceramica compreso KATANA™ AVENCIA™. CLEARFIL™ Universal Bond Quick può essere utilizzato sulla struttura del dente con PANAVIA™ SA Cement Universal per migliorare la forza adesiva.



Procedura con PANAVIA™ SA Cement Universal



Sabbiare con polvere di allumina.



Applicare il cemento sulla corona.



Posizionare la corona.



Fotopolimerizzare da 2 a 5 secondi o autopolimerizzare da 2 a 4 minuti; poi rimuovere il cemento in eccesso.



Fotopolimerizzare il margine e mantenere l'isolamento per 5 minuti.

Fare riferimento alle istruzioni d'uso per indicazioni complete sull'utilizzo.

GAMMA PRODOTTO

CEREC

Codice	Dimensione*	Colori	Contenuto
#4101-EU	12	A2	5 blocchi
#4102-EU	12	A3	5 blocchi
#4103-EU	12	A3.5	5 blocchi
#4147-EU	14L	A2	5 blocchi
#4148-EU	14L	A3	5 blocchi
#4149-EU	14L	A3.5	5 blocchi

UNIVERSALE

Codice	Dimensione*	Colori	Contenuto
#3650-EU	12	A2	5 blocchi
#3651-EU	12	A3	5 blocchi
#3652-EU	12	A3.5	5 blocchi
#3686-EU	14L	A2	5 blocchi
#3687-EU	14L	A3	5 blocchi
#3688-EU	14L	A3.5	5 blocchi

Per maggiori informazioni visitare kuraraynoritake.eu/katana-avencia-block

*Dimensione del blocco

	a (altezza)	b (larghezza)	c (lunghezza)
12	10 mm	12 mm	15 mm
14L	14,5 mm	14,5 mm	18 mm



CONTATTI

Kuraray Europe Italia S.r.l
Via Boccaccio 21,
20123 Milano

Telefono 02 63471228
E-Mail dental-italia@kuraray.com
Web www.kuraraynoritake.eu/it



facebook.com/KurarayNoritakeInLab
facebook.com/KurarayNoritakeInClinic



Kuraray Noritake Dental Inc.
1621 Sakazu, Kurashiki, Okayama 710-0801, Japan

Per saperne di più scansiona il QR Code:



- Prima di utilizzare il prodotto, accertarsi di aver letto le Istruzioni d'uso fornite con il prodotto.
- Le specifiche e l'aspetto del prodotto sono soggetti a variazione senza preavviso.
- Il colore stampato può differire leggermente dal colore effettivo.

"KATANA" è un marchio di NORITAKE CO., LIMITED.

"AVENCIA", "CLEARFIL" e "PANAVIA" sono marchi di Kuraray Co., Ltd

"CEREC" è un marchio di Dentsply Sirona Inc.



LW22-01 11/2020