

CLEARFIL™ DC CORE PLUS

Aanvullende product- en bestelinformatie

Assortiment



CLEARFIL™ DC CORE PLUS KIT

#2940 EU Dentine

#2941 EU Wit

Inhoud: CLEARFIL™ DC CORE PLUS (dentine of wit): 1 spuit (17,9 g / 9 ml); CLEARFIL™ S³ BOND PLUS: 1 flesje (1 ml); Toebehoren: 20 mengtips, 10 applicatietips (L), 10 applicatietips (S), 50 applicatieborsteltjes (endo), 1 doseerschaaftje, lichtwerend dekseltje

CLEARFIL™ DC CORE PLUS Refill

#2942 EU Dentine

#2943 EU Wit

Inhoud: 1 spuit (17,9 g / 9 ml), 20 mengtips, 10 applicatietips (L), 10 applicatietips (S)

CLEARFIL™ S³ BOND PLUS Refill

#2892 EU 1 flesje à 4 ml

Accessoires

#1029 EU CLEARFIL™ DC CORE PLUS Guide Tip (L) 20 applicatietips

#1030 EU CLEARFIL™ DC CORE PLUS Guide Tip (S) 20 applicatietips

#1031 EU CLEARFIL™ DC CORE PLUS Mixing Tip 20 mengtips

#1025 EU CLEARFIL™ S³ BOND PLUS Applicatieborsteltjes (endo)

50 applicatieborsteltjes

#2832 EU CLEARFIL™ DC CORE PLUS Dispenser

Aanbevolen product

PANAVIA™ POST Introductiekit

#1190 EU

Inhoud: PANAVIA™ POST Nr. 3 (2 st.), Nr. 4 (2 st.), Nr. 5 (2 st.), Nr. 6 (2 st.)

Kleuren

CLEARFIL™ DC CORE PLUS KIT is in volgende kleuren beschikbaar.



Dentine



Wit

Kuraray Dental Benelux B.V.
NL Postbus 299, 1970 AG IJmuiden, Tel: +31 (0)255 523 701
info@kuraraydental.nl, www.kuraraydental.nl
B Tel: +32 (0)475 616 050, info@kuraraydental.be
www.kuraraydental.be

kuraray

kuraray

CLEARFIL™ DC CORE PLUS

De nieuwe standaard in stompopbouw



- ✓ ZEER EENVOUDIGE PROCEDURE
- ✓ ÓÓK MET CLEARFIL™ S³ BOND PLUS CHEMISCH UITHARDEND
- ✓ APPLICEREN MET >25% MINDER KRACHT*
- ✓ 'NON-SLUMPING FORMULA'
- ✓ NIET TUSSENDOOR VAN MENG TIP WISSELEN



Réponse payée / Respons betaald
Pays-Bas / Nederland

Kuraray Dental Benelux B.V.
Int. Antwoordnummer
I.B.R.S. / C.C.R.I. Numéro 327
NL-1970 VB IJmuiden
PAYS-BAS



CLEARFIL™ DC CORE PLUS

De nieuwe standaard in stompopbouw

CLEARFIL™ DC CORE PLUS KIT

CLEARFIL™ DC CORE PLUS is een dual-cure (licht- en chemisch uithardend) twee componenten stompopbouw materiaal. Geleverd in een automixsysteem voor esthetische en betrouwbare restauraties. De chemisch uithardende eigenschap van CLEARFIL™ DC CORE PLUS is ideaal in het wortelkanaal waar geen polymerisatielicht bij kan. Het uithardingsproces wordt eventueel versneld door lichtuitharding.

Een snelle en eenvoudige applicatie bij een stompopbouw is essentieel om het contaminatierisico te beperken. CLEARFIL™ DC CORE PLUS is ontwikkeld om snel en eenvoudig te restaureren door de vereenvoudigde procedure en een optimale verwerking. Alle stappen - vanaf de voorbereiding van het wortelkanaal tot aan de stompopbouw – voert u met slechts één enkele mengtip uit, dankzij de drie minuten verwerkingstijd.


Uw voordelen

- ✓ Eenvoudige klinische procedure
- ✓ Appliceren met >25% minder kracht*
- ✓ Een verminderd risico op wortelbreuk en breuk van het stompopbouw materiaal dankzij de juiste elasticiteit en mechanische eigenschappen
- ✓ Een lager risico op debonding en geringe schade aan het dentine door de adhesietechnologie van Kuraray.

Gemakkelijke en zeer eenvoudige klinische procedure

CLEARFIL™ DC CORE PLUS heeft drie voordelen om het contaminatierisico te verminderen.

1. Eenvoudige bondingprocedure met CLEARFIL™ S³ BOND PLUS


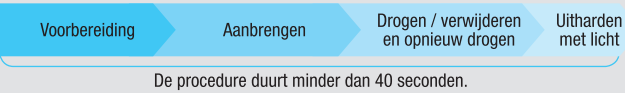


Niet mengen,
Niet schudden

Niet invrijven. Niet in meerdere
lagen aanbrengen

⚠ Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing!

2. Voldoende lange verwerkingstijd met één mengtip**

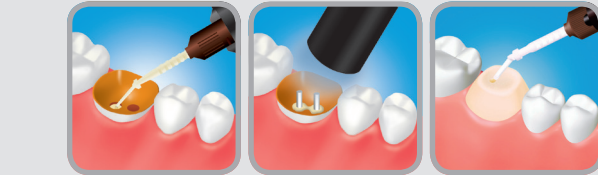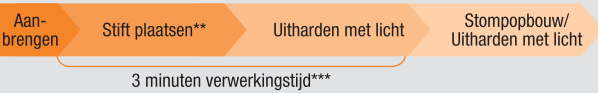

** Stiftbehandeling noodzakelijk voor plaatsing.
*** Na het aanbrengen van de pasta in het wortelkanaal, bedraagt de verwerkingstijd van de pasta één minuut.

3. Twee soorten tips




De nieuwe vulstoftechnologie die in CLEARFIL™ DC CORE PLUS wordt toegepast maakt het materiaal thixotroop. Daardoor is het met >25% minder kracht* te appliceren.

CLEARFIL™ DC CORE PLUS vormt samen met het normaliter lichtuithardende CLEARFIL™ S³ BOND PLUS een unieke en gebruiksvriendelijke combinatie. Deze twee materialen harden namelijk chemisch uit als ze met elkaar in contact komen. Omslachtige, foutgevoelige en tijdrovende meerstapsprocedures zijn hierdoor verleden tijd. Dankzij de uitstekende hechtingseigenschappen, is het zelfetsende CLEARFIL™ S³ BOND PLUS de perfecte aanvulling voor CLEARFIL™ DC CORE PLUS. Met uitstekende klinische prestaties tot gevolg. De zelfets-techniek realiseert een betrouwbare dentinehechting.


*t.o.v. CLEARFIL™ DC CORE AUTOMIX

Minimaal risico op wortelbreuk en breuk van het stompopbouw materiaal

Grote krachten richting de wortelpunt worden vermeden. Dit komt doordat CLEARFIL™ DC CORE PLUS een E-modulus heeft die in de buurt ligt van die van dentine. Krachten worden verdeeld over het totale worteloppervlak. Dankzij de gunstige


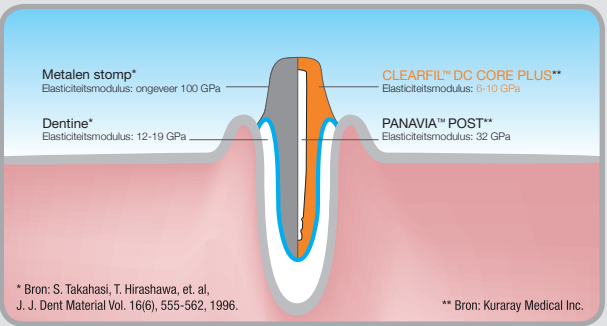


mechanische eigenschappen van CLEARFIL™ DC CORE PLUS bent u ook onder invloed van kauwkrachten verzekerd van een stabiele restauratie. Een minimaal risico op wortel- en stompfractuur is daardoor gegarandeerd.

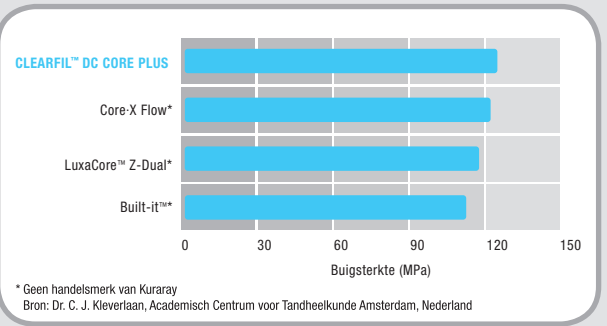


Verminderd risico op loskomen en minimale dentineschade

CLEARFIL™ S³ BOND PLUS is het gebruiksvriendelijke, zelfetsende, lichtuithardende éénstapsadhesief. In combinatie met CLEARFIL™ DC CORE PLUS biedt het nog meer vanwege de specifieke versneller voor chemische uitharding. Voor de plaatsen die niet met licht kunnen worden bereikt, verzekert de aanvullende chemische uitharding uitstekende en betrouwbare resultaten.

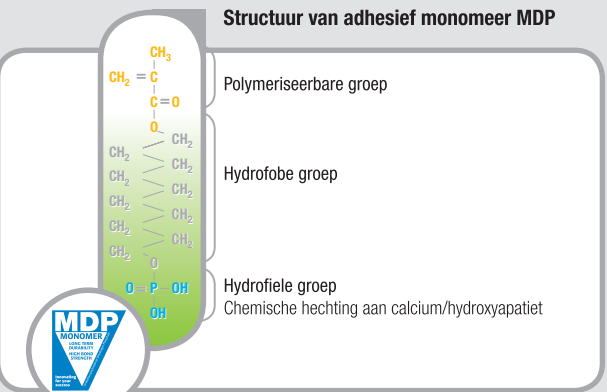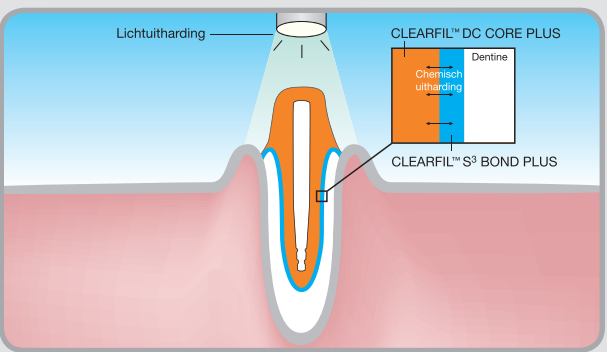

Buitengewone hechtsterkte bevestigd!

De uitzonderlijke adhesie-eigenschappen aan dentine in vergelijking met andere stompopbouwssystemen.

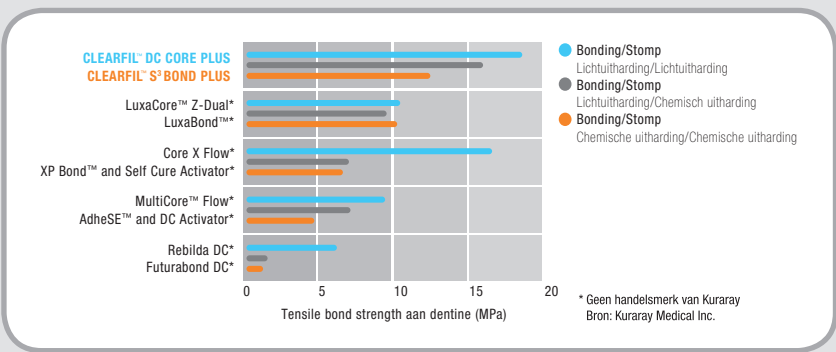

Ja, ik bestel

CLEARFIL™ DC CORE PLUS KIT € 138,-

- ☐ #2940 EU Dentine
- ☐ #2941 EU Wit
- Inhoud: CLEARFIL™ DC CORE PLUS (dentine of wit): 1 spuit (17,9 g / 9 ml); CLEARFIL™ S³ BOND PLUS: 1 flesje (1 ml); Toebehoren: 20 mengtips, 10 applicatietips (L), 10 applicatietips (S), 50 applicatieborsteltjes (endo), 1 doseerschaaftje, 1 lichtblokkeringsdekseltje

CLEARFIL™ DC CORE PLUS Refill € 112,40

- ☐ #2942 EU Dentine
- ☐ #2943 EU Wit
- Inhoud: 1 spuit (17,9 g / 9 ml), 20 mengtips, 10 applicatietips (L), 10 applicatietips (S)
- ☐ #2892 EU CLEARFIL™ S³ BOND PLUS Refill € 99,-
- 1 flesje à 4 ml

Accessoires

- ☐ #1029 EU CLEARFIL™ DC CORE PLUS Applicatietips (L) € 20,-
- 20 stuks
- ☐ #1030 EU CLEARFIL™ DC CORE PLUS Applicatietips (S) € 20,-
- 20 stuks
- ☐ #1031 EU CLEARFIL™ DC CORE PLUS Mengtips € 30,-
- 20 stuks
- ☐ #1025 EU CLEARFIL™ S³ BOND PLUS € 16,80
- Applicatieborsteltjes (endo)
- 50 applicatieborsteltjes
- ☐ #2832 EU CLEARFIL™ DC CORE Dispenser € 51,60
- ☐ #1190-EU PANAIA™ POST Introductiekit € 99,-
- Inhoud: PANAIA™ POST Nr. 3 (2 st.), Nr. 4 (2 st.), Nr. 5 (2 st.), Nr. 6 (2 st.)

- ☐ Neem contact met mij op voor een Iqual/studiegroep lezing
- ☐ Ja, ik ontvang graag de opbouwwijzer CD
- ☐ Stuur mij de laatste onderzoeken toe over CLEARFIL™ DC CORE PLUS
- ☐ Ja ik wil de digitale nieuwsbrief ontvangen

Praktijknaam _____

Dhr/Mevr* Voorl. _____ Naam _____

Straat _____

Postcode _____ Woonplaats _____

E-mail _____

Dental depot _____

Handtekening _____

* Doorhalen wat niet van toepassing is. Prijzen exclusief BTW. Prijswijzigingen onder voorbehoud. Producten worden uitgeleverd tegen de prijs van het door u gekozen dental depot.