

CLEARFIL™ DC CORE PLUS

Informations complémentaires relatives au produit et aux commandes

Assortiment



CLEARFIL™ DC CORE PLUS KIT

#2940 EU Dentine

#2941 EU Blanc

Contenu: CLEARFIL™ DC CORE PLUS (Dentine ou Blanc): 1 seringue (17,9 g / 9 ml); CLEARFIL™ S³ BOND PLUS: 1 flacon (1 ml); Accessoires: 20 compules mélangeuses 10 compules d'application (L), 10 compules d'application (S), 50 petites brosses d'application (endo), 1 coupelle de dosage, 1 couvercle de protection contre la lumière

CLEARFIL™ DC CORE PLUS Refill

#2942 EU Dentine

#2943 EU Blanc

Contenu: 1 seringue (17,9 g / 9 ml), 20 compules mélangeuses, 10 compules d'application (L) 10 compules d'application (S)

CLEARFIL™ S³ BOND PLUS Refill

#2892 EU 1 flacon de 4 ml

Accessoires

#1029 EU CLEARFIL™ DC CORE PLUS Guide Tip (L) 20 compules d'application

#1030 EU CLEARFIL™ DC CORE PLUS Guide Tip (S) 20 compules d'application

#1031 EU CLEARFIL™ DC CORE PLUS Mixing Tip 20 compules mélangeuses

#1025 EU CLEARFIL™ S³ BOND PLUS Brosses d'application (endo)

50 brosses d'application

#2832 EU CLEARFIL™ DC CORE PLUS Distributeur

Produit recommandé

PANAVIA™ POST Kit d'introduction

#1190 EU

Contenu: PANAVIA™ POST n° 3 (2 pièces), n° 4 (2 pièces), n° 5 (2 pièces), n° 6 (2 pièces)

Teintes

Le kit CLEARFIL™ DC CORE PLUS est disponible dans les teintes suivantes.



Dentine



Blanc

Kuraray Dental Benelux B.V.

B Tél.: +32 (0)475 819 258, info@kuraraydental.be, www.kuraraydental.be

NL Boîte postale 299, 1970 AG IJmuiden, Pays-Bas, Tel: +31 (0)255 523 701 info@kuraraydental.nl, www.kuraraydental.nl

kuraray

CLEARFIL™ DC CORE PLUS

La nouvelle norme en matière de reconstitution de moignons



- ✓ PROCÉDURE EXTRÊMEMENT SIMPLE
- ✓ EGALEMENT AUTOPOLYMÉRISATION EN COMBINAISON AVEC CLEARFIL™ S³ BOND PLUS
- ✓ APPLICATION AVEC >25% DE FORCE EN MOINS*
- ✓ 'NON-SLUMPING FORMULA'
- ✓ IL N'EST PLUS NÉCESSAIRE DE CHANGER DE COMPULE MÉLANGEUSE EN COURS DE TRAITEMENT



Réponse payée / Respons betaald
Pays-Bas / Nederland

Kuraray Dental Benelux B.V.
Int. Antwoordnummer
I.B.R.S. / C.C.R.I. Numéro 327
NL-1970 VB IJmuiden
PAYS-BAS



CLEARFIL™ DC CORE PLUS

La nouvelle norme en matière de reconstitution de moignons

CLEARFIL™ DC CORE PLUS KIT

CLEARFIL™ DC CORE PLUS est un matériau de reconstitution de moignons bi-composant à double polymérisation (photopolymérisation et autopolymérisation). Il est fourni dans un système automélangeur pour des restaurations esthétiques et fiables. La propriété d'autopolymérisation de CLEARFIL™ DC CORE PLUS convient idéalement dans le canal radiculaire auquel il n'est pas possible d'accéder avec la lampe de polymérisation. Le processus de durcissement est éventuellement accéléré par la photopolymérisation.

Dans le cas de la reconstitution d'un moignon, une application rapide et simple est essentielle pour limiter le risque de contamination. CLEARFIL™ DC CORE PLUS a été mis au point pour une restauration rapide et aisée grâce à la procédure simplifiée et à une mise en œuvre optimale. Toutes les étapes – à partir de la préparation du canal radiculaire jusqu'à la reconstitution du moignon – sont exécutées au moyen d'une seule compule

mélangeuse, grâce au temps de travail de trois minutes. La nouvelle technologie des matières de charge utilisée dans CLEARFIL™ DC CORE PLUS rend le matériau thixotrope. La force* à appliquer s'en trouve ainsi réduite de > 25%.

CLEARFIL™ DC CORE PLUS forme, conjointement avec CLEARFIL™ S³ BOND PLUS qui, normalement, est photopolymérisable, une combinaison unique et conviviale d'utilisation. En effet, ces deux matériaux se polymérisent chimiquement lorsqu'ils sont mis en contact. De ce fait, les procédures à plusieurs étapes, qui étaient fastidieuses, sensibles aux erreurs et qui prenaient beaucoup de temps, font désormais partie du passé. Grâce aux excellentes propriétés d'adhésion, le CLEARFIL™ S³ BOND PLUS automordançant complète parfaitement CLEARFIL™ DC CORE PLUS. Il en résulte d'excellentes prestations cliniques. La technique d'automordançage est garantie d'une adhésion fiable à la dentine.

*par rapport à CLEARFIL™ DC CORE AUTOMIX


Vos avantages

- ✓ Procédure clinique simple
- ✓ Application avec > 25% de force en moins*
- ✓ Risque réduit de fracture radiculaire et de rupture du matériau de reconstitution de moignons grâce à l'élasticité appropriée et aux propriétés mécaniques.
- ✓ Risque moindre de décollement et dommage limité au niveau de la dentine grâce à la technologie d'adhésion de Kuraray.

Procédure clinique extrêmement simple

CLEARFIL™ DC CORE PLUS présente trois avantages permettant de réduire le risque de contamination.

1. Procédure de collage simple avec CLEARFIL™ S³ BOND PLUS

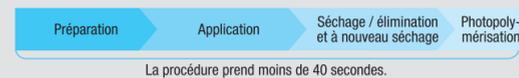

Ne pas mélanger, Ne pas agiter
Ne pas faire pénétrer en frottant
Ne plus appliquer en différentes couches

⚠ Veuillez lire le mode d'emploi avant utilisation!

2. Temps d'utilisation suffisamment long, au moyen d'une seule compule mélangeuse**




** Traitement du tenon nécessaire avant mise en place.
***Après application de la pâte dans le canal radiculaire, le temps d'utilisation de la pâte est d'une minute.

3. Deux types de compules




Risque minimum de fracture radiculaire et de rupture du matériau de reconstitution de moignons

Les forces importantes en direction de la pointe de la racine sont évitées, parce que CLEARFIL™ DC CORE PLUS présente un module d'élasticité proche de celui de la dentine. Les forces sont réparties sur toute la surface de la racine. Grâce aux

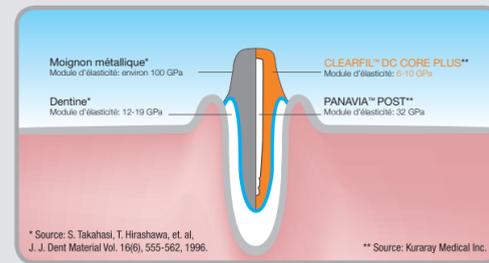


Risque réduit de détachement et dommage minimal au niveau de la dentine


CLEARFIL™ S³ BOND PLUS est l'adhésif convivial, automordançant, photopolymérisable et à une étape par excellence. En combinaison avec CLEARFIL™ DC CORE PLUS, il offre encore davantage du fait de l'initiateur spécifique de l'autopolymérisation. Pour les endroits inaccessibles à la lumière, l'autopolymérisation complémentaire garantit d'excellents résultats fiables.

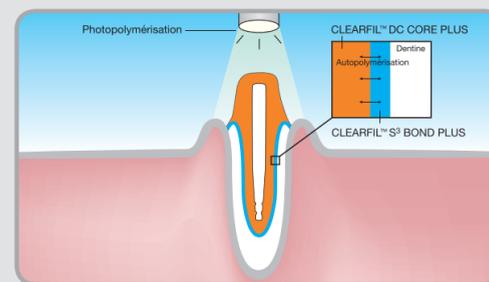

propriétés mécaniques favorables de CLEARFIL™ DC CORE PLUS, même en présence de forces de mastication, vous êtes assuré d'une restauration stable. De ce fait, un risque minimal de fracture de la racine et du moignon est garanti.

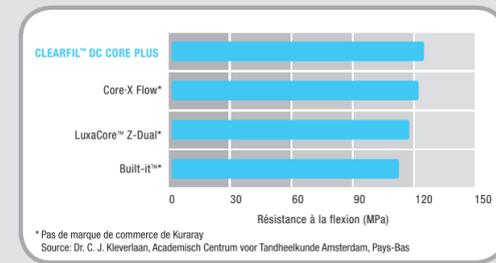


Propriétés d'adhésion exceptionnelles à la dentine en comparaison avec d'autres systèmes de reconstitution de moignons. CLEARFIL™ S³ BOND PLUS assure une adhésion chimique résistante à l'hydroxyapatite. Grâce à la combinaison de monomère MDP et au mordançage doux, il en résulte une résistance élevée à l'adhésion et une adhésion durable au tissu dentaire.

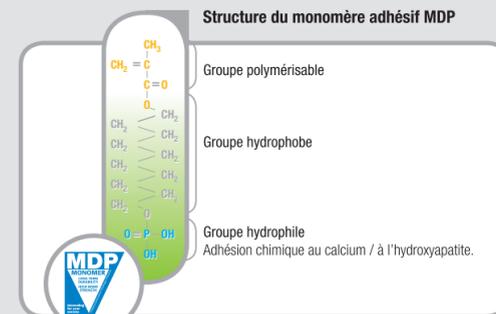

Pouvoir adhésif exceptionnel confirmé!

Propriétés d'adhésion exceptionnelles à la dentine en comparaison avec d'autres systèmes de reconstitution de moignons.

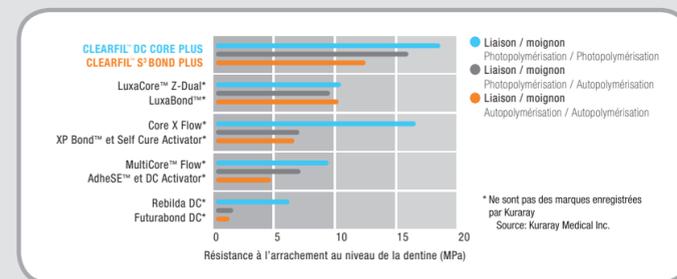

Oui, je commande

- CLEARFIL™ DC CORE PLUS KIT** € 138,-
- #2940 EU Dentine
- #2941 EU Blanc
- Contenu: CLEARFIL™ DC CORE PLUS (Dentine ou Blanc): 1 seringue (17,9 g / 9 ml); CLEARFIL S3 BOND PLUS: 1 flacon (1 ml); Accessoires: 20 compules mélangeuses, 10 compules d'application (L), 10 compules d'application (S), 50 petites brosses d'application (endo), 1 coupelle de dosage, 1 couvercle de protection contre la lumière
- CLEARFIL™ DC CORE PLUS Refill** € 112,40
- #2942 EU Dentine
- #2943 EU Blanc
- Contenu: 1 seringue (17,9 g / 9 ml), 20 compules mélangeuses, 10 compules d'application (L) 10 compules d'application (S)
- #2892 EU CLEARFIL™ S³ BOND PLUS Refill € 99,-
- 1 flacon de 4 ml
- Accessoires**
- #1029 EU CLEARFIL™ DC CORE PLUS Compules d'application (L) € 20,-
- 20 pièces
- #1030 EU CLEARFIL™ DC CORE PLUS Compules d'application (S) € 20,-
- 20 pièces
- #1031 EU CLEARFIL™ DC CORE PLUS Compules mélangeuses € 30,-
- 20 pièces
- #1025 EU CLEARFIL™ S³ BOND PLUS € 16,80
- Broches d'application (endo)**
- 50 broches d'application
- #2832 EU CLEARFIL™ DC CORE Distributeur € 51,60
- #1190-EU PANAVIA™ POST Kit d'introduction € 99,-
- Contenu: PANAVIA™ POST n° 3 (2 pièces), n° 4 (2 pièces), n° 5 (2 pièces), n° 6 (2 pièces)

- Veuillez me contacter pour une conférence / un groupe d'étude IQual
- Oui, j'aimerais recevoir le CD-Rom de la procédure de reconstitution
- Veuillez m'envoyer les dernières études concernant CLEARFIL™ DC CORE PLUS
- Oui, j'aimerais recevoir le bulletin d'information numérique

Nom du cabinet _____
 Monsieur/Madame* Initiales _____ Nom _____
 Rue _____
 Code postal _____ Commune _____
 E-mail _____
 Dépôt dentaire _____
 Signature _____

* Biffer les mentions inutiles Prix hors T.V.A. Sous réserve de modifications des prix. Les produits sont fournis aux prix pratiqués par le dépôt dentaire de votre choix.