

Suivez les procédés standard suivants pour le contrôle de l'humidité, la préparation du canal radiculaire et l'essai d'ajustement du tenon.

Lorsque CLEARFIL™ DC CORE PLUS est employé pour le scellement du tenon

### 1 Traitement de la surface du tenon

**5 sec.** Pour les tenons en fibre de verre :

- Appliquer de l'acide phosphorique, laisser agir 5 sec., laver et sécher par flux d'air
- Appliquer l'agent liant au silane ou le mélange de BOND et d'ACTIVATOR, et sécher par léger flux d'air.

Pour les tenons en métal précieux\*  
Appliquer le primer métallique au métal et sécher par léger flux d'air.

Pour les tenons en métal non précieux\*  
Appliquer le BOND et sécher par léger flux d'air après 5 sec.

### 2 Appliquer le BOND sur le canal radiculaire

**10 sec.**

### 3 Sécher par léger flux d'air\*

**plus de 5 sec.**

### 4 Supprimer l'excédent du BOND avec une pointe en papier, et sécher à nouveau par un léger flux d'air.

### 5 Photo-polymérisation\*

**10 sec.**

### 6 Comprimer la PÂTE\*

### 7 Insérer le tenon et photo-polymériser la PÂTE\*

### 8 Appliquer la PÂTE autour du tenon.

### 9 Photo-polymériser la PÂTE \*1, \*2 tant du côté lingual que du côté labial (buccal).

\* Si nécessaire, passer au sablage avec de la poudre d'alumine avant application.

\* Sécher la surface adhérente en entier et suffisamment jusqu'à ce que le BOND ne bouge plus. Utiliser une pompe à salive afin d'éviter que le BOND ne se disperse.

\* Pour les détails de polymérisation des unités dentaires, voir les instructions d'utilisation.

\* Vous devez commencer avec l'étape n° 7 en l'espace d'1 min.

\* Cf. tableau 2 pour le temps de photo-polymérisation.

\* 1 Cf. tableau 2 pour le temps de photo-polymérisation.

\* 2 Laisser agir la PÂTE pendant plus de 6 minutes après la photo-polymérisation lorsque l'épaisseur de la PÂTE est supérieure à la profondeur de polymérisation spécifiée.

Tableau 1 : nom légal du produit et nom abrégé du produit utilisé dans cette fiche

| Nom légal du produit               | Nom abrégé du produit |
|------------------------------------|-----------------------|
| CLEARFIL™ DC CORE PLUS             | PÂTE                  |
| CLEARFIL™ TRI-S BOND PLUS          | BOND                  |
| CLEARFIL™ PORCELAIN BOND ACTIVATOR | ACTIVATOR             |

Tableau 2 : Relation entre le temps de polymérisation et la profondeur de polymérisation pour chaque unité de polymérisation dentaire

| Type     | Temps de polymérisation | Profondeur de polymérisation |
|----------|-------------------------|------------------------------|
| Halogène | 10 secondes             | 1,5 mm                       |
|          | 20 secondes             | 2 mm                         |
| L.E.D.   | 10 secondes             | 1,5 mm                       |
|          | 20 secondes             | 2 mm                         |