

kuraray


Noritake

APPROFONDIMENTI & PROMO



OFFERTE VALIDE DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2023

Rapid Bond Technology: adesione istantanea e di lunga durata

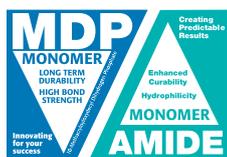

LA COMBINAZIONE DELL'ORIGINALE MONOMERO 10-MDP, BREVETTO KURARAY NORITAKE, CON I MONOMERI AMMIDICI IDROFILI RENDE POSSIBILE LA TECNOLOGIA DI ADESIONE RAPIDA (RAPID BOND TECHNOLOGY) ALLA BASE DI CLEARFIL™ UNIVERSAL BOND QUICK

Kuraray Noritake Dental è pioniere nel campo degli adesivi dentali per sviluppo del monomero originale 10-MDP, brevettato nel 1981. Combinando il nostro MDP con monomeri ammidici idrofili, abbiamo sviluppato la Tecnologia di Adesione Rapida (Rapid Bond Technology) che sta alla base di CLEARFIL™ Universal Bond Quick, l'adesivo universale ad azione istantanea.

Assorbimento d'acqua incredibilmente basso

Uno degli indicatori più importanti del successo a lungo termine dell'adesione dentinale è il livello di assorbimento dell'acqua nella matrice organica del bond. Un alto tasso di assorbimento dell'acqua è stato clinicamente collegato al continuo deterioramento fisico dei legami, che può portare allo sviluppo di carie secondarie. Per questo motivo, abbiamo scelto di mantenere il contenuto di HEMA il più basso possibile. CLEARFIL™ Universal Bond Quick crea una rete polimerica altamente reticolata, grazie ai monomeri ammidici utilizzati nella Rapid Bond Technology. Di conseguenza, il tasso di assorbimento dell'acqua è relativamente basso, il che significa che la rete polimerica è più stabile a lungo termine.

Adesione estetica ed efficace

La Rapid Bond Technology non fornisce solo una base per un'eccellente adesione duratura nel tempo. Il sottile strato del film (5-10 µm) di CLEARFIL™ Universal Bond Quick conferisce ai restauri un'ottima estetica e la sua rete polimerica densamente reticolata rafforza la stabilità di questo strato esterno e fornisce resistenza alla decolorazione marginale.



L'ADESIVO UNIVERSALE AD AZIONE ISTANTANEA

ADESIVO UNIVERSALE

CLEARFIL™ Universal Bond Quick - Ricambio

1 flacone (5ml)

(3572-EU)

CLEARFIL™ UNIVERSAL BOND QUICK
PREMIATO CON IL REALITY CHOICES
E PER IL TERZO ANNO CONSECUTIVO
DA DENTAL ADVISOR



**PER CONOSCERE
IL PREZZO SPECIALE DI
CLEARFIL™ UNIVERSAL BOND
QUICK REFILL,
CONTATTA IL NOSTRO
REFERENTE DELLA TUA AREA.**

**TROVI I CONTATTI IN ULTIMA
PAGINA DI QUESTO FLYER.**

SCOPRI DI PIÙ
INQUADRA IL QR CODE



PANAVIA™ SA CEMENT UNIVERSAL: il tuo cemento quotidiano

Testimonianza del Dr. Troy Schmedding,
DDS, docente di odontoiatria e autore, USA



IL MONOMERO ORIGINALE 10-MDP, CONSENTE LA REATTIVITÀ CHIMICA, MENTRE IL MONOMERO LCSi ASSICURA UN LEGAME CHIMICO FORTE E DURATURO CON LA CERAMICA

L'odontoiatria si è certamente evoluta negli anni in cui Kuraray Noritake Dental Inc. ha sviluppato il monomero fosfato MDP. Il monomero originale MDP è un ingrediente chiave della linea di cementi PANAVIA™ che continua a evolversi in linea con la crescente varietà di materiali da restauro tra cui scegliere.

Un esempio di questa evoluzione è PANAVIA™ SA Cement Universal, uno dei primi veri cementi resina autoadesivi universali ad arrivare sul mercato. Oltre al monomero MDP originale, che favorisce l'adesione a smalto, metalli, dentina e zirconia, incorpora anche: il monomero LCSi, una catena di carbonio a base di silano che forma un legame chimico con i materiali in ceramica e vetroceramica.



Ma a parte la chimica, quali sono gli altri benefici che questo prodotto offre al clinico? **Uno dei vantaggi principali di PANAVIA™ SA Cement Universal è l'eliminazione della confusione su come trattare i diversi substrati. Questo perché il materiale aderisce praticamente a tutti i materiali senza bisogno di un primer separato.** L'eventuale dubbio su 'come condizionare la zirconia' o 'come condizionare la vetroceramica' non è più un problema, perché la formulazione della pasta consente di ottenere un legame forte indipendentemente dal substrato utilizzato, grazie al monomero MDP che consente una forte adesione alla zirconia, e al monomero LCSi che crea un legame chimico con la vetroceramica.



"PANAVIA™ SA Cement Universal consente di ottenere una forte adesione indipendentemente dal substrato utilizzato"

**DR. TROY SCHMEDDING, DDS
USA**

CEMENTARE TUTTI I MATERIALI, SENZA PRIMER

PANA VIA™ SA CEMENT UNIVERSAL
PREMIATO PER IL TERZO ANNO CONSECUTIVO
DA DENTAL ADVISOR



CEMENTO RESINA AUTOADESIVO

PANA VIA™ SA Cement Universal - Automix standard pack

1 siringa da 8,2g, 20 puntali di miscelazione

UNIVERSAL (4212-EU)

WHITE (4213-EU)

TRANSLUCENT (4214-EU)

€ 85,00

ANZICHÈ € 105,00

SCONTO 20%



PANA VIA™ SA CEMENT Universal
è disponibile anche nella versione HANDMIX
in siringhe da 9,2g nei colori a scelta tra
Universal, White, Translucent



SCOPRI DI PIÙ
INQUADRA IL QR CODE



PANAVIA™ V5: per tutte le indicazioni e una sola procedura primer

Testimonianza del Dr. Troy Schmedding,
DDS, docente di odontoiatria e autore, USA



IL MONOMERO ORIGINALE 10-MDP CHE CONSENTE
LA REATTIVITÀ CHIMICA, È UN BREVETTO ORIGINALE
KURARAY NORITAKE

Da PANAVIA™ EX a PANAVIA™ V5, la linea di cementi di punta di Kuraray Noritake Dental Inc. continua a evolversi per offrire un'adesione affidabile, una maggiore facilità d'uso e un'estetica superiore.

Negli ultimi quarant'anni, il monomero MDP, ingrediente fondamentale nei nostri sistemi di cementazione, si è radicato nell'odontoiatria restaurativa come elemento di comprovata efficacia su cui i dentisti fanno affidamento per ottenere una forte adesione alla struttura del dente, ai metalli e alla zirconia.

PANAVIA™ V5 è il cemento più forte ed estetico di Kuraray Noritake Dental. Disponibile in 5 colori - White, Brown, Universal, Clear, Opaque - è il risultato di attenti studi lunghi più di 10 anni da parte dei ricercatori. È dotato di un catalizzatore privo di ammine che consente una maggiore stabilità del colore e una migliore forza di adesione alla dentina.

Come i suoi predecessori, PANAVIA™ V5 offre una procedura di cementazione semplice e compatibile con tutte le indicazioni, dagli abutment per corone e ponti e impianti, agli intarsi in ceramica e alle faccette.



"Kuraray Noritake Dental Inc. gode di una reputazione incredibilmente solida nel campo dell'odontoiatria adesiva e la collaborazione con un'azienda rinomata che continua a ricercare ed evolvere i propri prodotti chiave rappresenta una valida fonte di affidabilità per i dentisti"

**DR. TROY SCHMEDDING, DDS
USA**

IL NOSTRO CEMENTO PIÙ FORTE ED ESTETICO

RESINA ADESIVA A POLIMERIZZAZIONE DUALE

PANA VIA™ V5 - Kit ricambio

1 siringa (8g), 20 puntali di miscelazione

UNIVERSAL (A2) (3611-EU)

CLEAR (3612-EU)

BROWN (A4) (3613-EU)

WHITE (3614-EU)

OPAQUE (3615-EU)

€ 109,00

ANZICHÈ € 127,50

SCONTO 15%

RESINA ADESIVA A POLIMERIZZAZIONE DUALE

PANA VIA™ V5 - Intro Kit

1 siringa (2,4 ml), Tooth Primer (2 ml),
Ceramic Primer Plus (2 ml),
10 puntali di miscelazione, 10 puntali endodontici,
50 pennelli applicatori, 1 piastra di miscelazione

UNIVERSAL (A2) (3604-EU)

CLEAR (3605-EU)

€ 99,00

ANZICHÈ € 137,00

SCONTO 28%



SCOPRI DI PIÙ
INQUADRA IL QR CODE



PANAVIA™ Veneer LC: il nuovo degno componente della dinastia di cementi PANAVIA™



PER VISUALIZZARE LA VALUTAZIONE COMPLETA, VISITA
WWW.REALITYRATINGS.COM

Appena lanciato e già testato: REALITY RATINGS & REVIEWS ha pubblicato una valutazione FirstLook del nuovissimo PANAVIA™ Veneer LC, un cemento resina fotopolimerizzabile per la cementazione permanente di faccette e inlay/onlay fino a 2 mm di spessore. Sulla base di test di laboratorio, si evince che ***“PANAVIA™ Veneer LC sembra essere un degno nuovo componente della dinastia di cementi PANAVIA™”.***

Durante i test, le caratteristiche del prodotto verificabili in laboratorio non hanno riservato sorprese: PANAVIA™ Veneer LC Paste è molto ben lucidabile con i sistemi di lucidatura utilizzati e il tempo di lavorazione è risultato esattamente pari a quello specificato da Kuraray Noritake Dental Inc. e, secondo i valutatori, questo tempo di lavorazione è più che sufficiente. Sebbene non siano state messe alla prova altre caratteristiche potenzialmente vantaggiose, come la resistenza all'usura e la stabilità del colore, i valutatori sono rimasti entusiasti delle proprietà di handling del prodotto.

Questa la loro opinione: ***“Il materiale possiede ottime proprietà di manipolazione, consentendo un facile posizionamento delle faccette. Inoltre, non è troppo fluido (la fluidità è pari a 5), ma allo stesso tempo non è eccessivamente denso da rischiare di rompere una faccetta ultrasottile. Inoltre, la sua consistenza facilita il posizionamento della faccetta e la rimozione degli eccessi con un livello di appiccicosità minimo o nullo”.***

Dotato di queste ottime caratteristiche, PANAVIA™ Veneer LC ha chiaramente il potenziale per semplificare la procedura di cementazione delle faccette: sono disponibili paste prova (Try-in Paste), l'offerta cromatica (quattro colori) è più che adeguata e la combinazione con la gamma PANAVIA™ V5 (condivisione della tecnologia, dei primer e delle paste prova) consente di utilizzare il prodotto con fiducia fin dall'inizio.



LO SPECIALISTA DELLE FACCETTE

CEMENTO RESINA FOTOPOLIMERIZZABILE

PANAVIA™ VEENER - Intro Kit

1 siringa (2,6g/1,5ml), 1 try-in paste "PANAVIA™ V5" (2,4g/1,8ml),
Tooth Primer (2ml), Ceramic Primer Plus (2ml),
K-etchant syringe (3ml), accessori

UNIVERSAL (A2) (4500-EU)

CLEAR (4501-EU)

€ 149,00

ANZICHÈ € 165,00

SCONTO 10%



SCOPRI DI PIÙ
INQUADRA IL QR CODE



La tecnologia di CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 Universal che semplifica la clinica

L'introduzione dei compositi universali, universali sia in termini di campo di applicazione sia di adattamento cromatico, segna l'alba di un nuovo tipo di composito. L'ultima aggiunta della nostra gamma di compositi è CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 Universal, il nuovo composito universale per cui espandiamo la definizione di universale includendo la copertura cromatica.


Nei restauri posteriori, il colore U della nostra linea Universal è sufficiente a coprire l'intera gamma VITA™, rendendo superfluo determinare la tonalità. Per i settori anteriori, sono disponibili due opzioni di colore: una variante più chiara e una più scura (UL e UD).

Ma cosa rende CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 Universal unico rispetto ad altri compositi universali o ad un solo colore? La differenza è che **con CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 Universal si può realizzare un restauro di successo e perfettamente corrispondente dal punto di vista cromatico, senza l'uso di un composito opaco aggiuntivo (bloccante)**, sia in caso di piccole cavità sia in caso di restauri più grandi di I e II classe. Anche nei settori anteriori è possibile realizzare un ottimo restauro di IV classe e non solo restauri di piccole lesioni di classe III o V.

Grazie all'innovativa Tecnologia di Diffusione della Luce (LDT) di Kuraray Noritake Dental integrata nei nostri compositi, la luce viene diffusa e riflessa in modo tale che il composito si integri perfettamente con la struttura dentale circostante.

Altri compositi si basano sull'effetto camaleonte, per cui la luce passa attraverso il materiale e viene riflessa dalle pareti della cavità. Il colore percepito del restauro è quindi il colore delle pareti della cavità. Se la cavità è troppo grande, richiede una maggiore quantità di materiale di riempimento, la luce deve viaggiare più lontano e una gran parte della luce viene assorbita. In questo caso, la luminosità del restauro si riduce e il colore delle pareti della cavità non viene più riflesso con precisione.

La nostra tecnologia LDT, invece, permette alla luce di essere diffusa all'interno del composito stesso, oltre che essere riflessa dalle pareti della cavità, come avviene nel tessuto dentale.

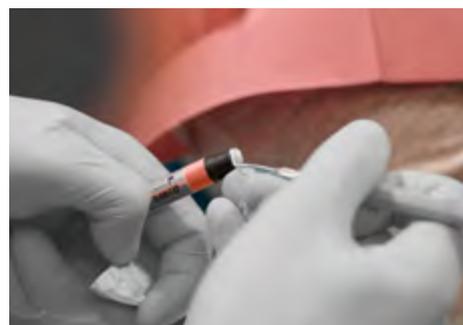

LA SEMPLIFICAZIONE INTELLIGENTE

COMPOSITO UNIVERSALE

CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 UNIVERSAL - Tripack: 3 siringhe

3 siringhe a scelta da 3,6 g. cad.

#3181-EU UNIVERSAL (U)

#3183-EU UNIVERSAL LIGHT (UL)

#3184-EU UNIVERSAL DARK (UD)

#3182-EU UNIVERSAL WHITE (UW)

€ 99,00

ANZICHÈ € 153,00

SCONTO 35%



SCOPRI DI PIÙ
INQUADRA IL QR CODE



La nostra tecnologia per il controllo dinamico di opacità e traslucenza

CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 Classic & Premium è il risultato di sette anni di scrupolosa ricerca che ha portato allo sviluppo di un composito avanzato di nuova concezione, basato sulla Tecnologia di Diffusione della Luce (LDT) sviluppata nei centri di ricerca Kuraray Noritake in Giappone.

Questo composito introduce un nuovo rapporto tra luce e materia e definisce una nuova classe di compositi biomimetici in grado di integrarsi con i tessuti dentali circostanti, grazie alle sue rivoluzionarie proprietà ottiche.

L'innovativa matrice polimerica ad elevato indice di rifrazione della luce e l'impiego di speciali riempitivi organici ad alta traslucenza, combinati a micro-r riempitivi di nuova concezione, trattengono e diffondono la luce all'interno del composito, amplificando la capacità del materiale di mimetizzarsi con la dentina e lo smalto circostante, rendendo il restauro con CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 di fatto indistinguibile dal dente naturale.



CLEARFIL MAJESTY™ ES-2

Classic

- Ideale per la tecnica monomassa;
- gamma colori basata sulla scala colori VITA™

• COLORI DISPONIBILI

A1, A2, A3, A3.5, A4, A6
B1, B2, B3, B4
C1, C2, C3, C4
D2, D3, XW, W



SCOPRI DI PIÙ



CLEARFIL MAJESTY™ ES-2

Premium

- Ideale per la tecnica di stratificazione;
- gamma colori composta da smalti e dentine

• COLORI DISPONIBILI

Dentina: XWD, WD, A1D, A2D, A3D, A3.5D, A4D

Smalto: XWE, WE, A1E, A2E, A3E, A3.5E, A4E

Translucent: Clear, Blue, Gray, Amber



SCOPRI DI PIÙ



INTEGRAZIONE PERFETTA

COMPOSITO ESTETICO

CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 Classic & Premium - Tripack: siringhe o PLT

3 Siringhe a scelta da 3,6g oppure 3 Pack PLT da 20 pz. x 0,25g cad.

VARI CODICI

€ 110,00

ANZICHÈ ~~€ 153,00~~

SCONTO 28%



IL COMPOSITO VERSATILE: 3 DIVERSI LIVELLI DI FLUIDITÀ



COMPOSITO FLUIDO

CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow - Tripack: siringhe

3 Siringhe da 2,7g/1,5ml cad.

VARI CODICI



€ 99,00

ANZICHÈ ~~€ 134,00~~

SCONTO 26%

SCOPRI DI PIÙ
INQUADRA IL QR CODE



L'EVOLUZIONE TECNOLOGICA DEL COMPOSITO

COMPOSITO RINFORATO CON NANO-CERAMICA

KATANA™ Avencia Block - Versione per CEREC

COLORI A SCELTA TRA A2 LT, A3 LT, A3.5 LT



1 CONFEZIONE DIMENSIONE 12
(5 blocchi)

€ 99,00

ANZICHÈ ~~€ 115,00~~

SCONTO 14%

1 CONFEZIONE DIMENSIONE 14L
(5 blocchi)

€ 103,00

ANZICHÈ ~~€ 120,00~~

SCONTO 14%

SCOPRI DI PIÙ
INQUADRA IL QR CODE



POLIMERIZZAZIONE DUALE, PROCEDURA VELOCE

COMPOSITO PER LA RICOSTRUZIONE DEI MONCONI

CLEARFIL™ DC CORE Plus

1 siringa da 17,9 g, 20 puntali di miscelazione,
10 puntali guida (L), 10 puntali guida (S)

DENTIN (2942-EU)

WHITE (2943-EU)



€ 88,90

ANZICHÈ € 118,00

SCONTO 25%

SCOPRI DI PIÙ
INQUADRA IL QR CODE



SEGUICI SUI SOCIAL

Seguici sui nostri social per restare aggiornato sui prodotti Kuraray Noritake.

Troverai news, casi clinici e informazioni sulle attività formative online e in presenza.



KurarayNoritakeInClinic



KurarayNoritakeInLab



kuraraynoritakeitalia



kuraraynoritakeinclick



Contatti

AREA NORD OVEST ITALIA

Valle d'Aosta, Piemonte,
Liguria, Lombardia



MONICA DI MARTINO

Cellulare: 340 3753041

E-mail: monica.dimartino@kuraray.com

AREA NORD EST ITALIA

Veneto, Trentino Alto Adige,
Friuli Venezia Giulia



FILIPPO BOGONI

Cellulare: 335 8163826

E-mail: filippo.bogoni@kuraray.com

AREA CENTRO NORD ITALIA

Emilia Romagna, Toscana, Marche



ALBERTO GIORDANO

Cellulare: 335 7306347

E-mail: alberto.giordano@kuraray.com

AREA CENTRO SUD ITALIA

Lazio, Abruzzo, Umbria,
Molise, Sardegna



MASSIMO SARTO

Cellulare: 329 0851551

E-mail: massimo.sarto@kuraray.com

AREA CENTRO SUD ITALIA

Lazio



ANTONIO CIPRO

Cellulare: 366 2071597

E-mail: antonio.cipro@kuraray.com

AREA SUD ITALIA

Campania, Basilicata, Puglia,
Calabria, Sicilia



BRUNO GARGIULO

Cellulare: 340 3808239

E-mail: bruno.gargiulo@kuraray.com

LABORATORY PRODUCTS SPECIALIST



FABRIZIO FOSSATI

Cellulare: 388 1443918

E-mail: fabrizio.fossati@kuraray.com

SALES MANAGER



FABIO QUARTI

Cellulare: 388 1444507

E-mail: fabio.quarti@kuraray.com