

POSTERIOR RESTAURATION MED KOMPOSIT

MED CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 UNIVERSAL



FALL AV DR ADRIEN LAVENANT

Dr Adrien Lavenant tog sin DDS-examen vid University of Aix- Marseille 2010. Han slutförde sin forskarutbildning inom parodontologi, restaurativ och estetisk tandvård (University Aix- Marseille och Paris). Dr Lavenant var från 2011 en del av lärarkåren på University of Aix-Marseille och han undervisar fortfarande på forskarprogrammet för restaurativ och estetisk tandvård. Sedan 2010, är han ägare av en privat praktik i Aix-en-Provence, specialiserad inom restaurativ, protetisk och estetisk implantattandvård. Han har varit medlem av den internationella Bio-emulation group sedan 2019 och delar med sig av sin filosofi för patientbehandling i enlighet med principerna för biomimetisk tandvård.

Introduktion

Patienten kom för en uppföljande undersökning och uppvisade sekundärkaries i den första högra molaren i överkäken. En behandling med direkt komposit behövde utföras. Vi bestämde oss för att använda kompositen CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 Universal från Kuraray Noritake Dental Inc. av flera skäl: behandlingens effektivitet, gynnsamma hanteringsegenskaper och enkelheten i användningen.

De kliniska bilderna nedan visar steg för steg approachen som genomfördes på ett 30 minuters behandlingstillfälle.



Fig. 1.

Initial situation visar en oklusal karieslesion på den första högra molaren i överkäken.



Fig. 2.
Pre-operativ röntgenbild.



Fig. 3.
Isolering av arbetsfältet med kofferdam.



Fig. 4.
Situation efter exkavering av karies och preparation av vävnad.



Fig. 5.
Kavitet redo för applicering av universalkompositen:
CLEARFIL™ Universal Bond Quick är synlig på dentin
och emalj och kavitetsbotten är täckt av ett tunt lager
CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Low.



Fig. 6.

Utseende på tanden efter uppbyggnad av restorationen med flera lager av kompositen CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 Universal (i färg U utvecklad för det posteriora området).



Fig. 7.

Stains applicerat i de ocklusala fissurerna ger ett ännu mer naturligt intryck.



Fig. 8.

Slutligt resultat efter polering med CLEARFIL™ Twist DIA och kontroll av ocklusionen.



Fig. 9.

Slutligt resultat omedelbart efter avlägsnande av kofferdam.



Fig. 10.
Post-operativ röntgenbild.



SLUTLIG SITUATION

Fig. 11.
Kontroll efter 15 dagar med rehydrerad dental vävnad.

BESÖK PRODUKTSIDAN ONLINE FÖR MER DETALJER

VAD DU KAN HITTA ONLINE

- ✓ Generell information om våra produkter
- ✓ Hela produktsortimentet
- ✓ Säkerhetsdatablad



KURARAYNORITAKE.EU/SE/CLEARFIL-MAJESTY-ES2-UNIVERSAL