

FINALIZAȚI CU UȘURINȚĂ RESTAURĂRILE MONOLITICE



CERABIEN

FC Paste Stain

kuraraynoritake.eu/fc-paste-stain

FINALIZAȚI CU UȘURINȚĂ RESTAURĂRILE CUT-BACK (FĂRĂ REDUCERE)

Vreți să adăugați o strălucire de lungă durată și un aspect și mai natural restaurărilor monolitice de zirconiu folosind tehnica de micro-stratificare? Produsul nostru **CERABIEN™ ZR FC Paste Stain** este tot ce aveți nevoie în combinație cu zirconiul estetic cum ar fi seria noastră de KATANA™ Zirconia multi-strat. Permite crearea cu ușurință, pe restaurările monolitice, a unor efecte cromatice și texturi individualizate, cu rezultate uniforme și previzibile.





FC Paste Stain

CARACTERISTICI & BENEFICII

1

PERFORMANȚĂ CONSTANTĂ

Manevrabilitate și proprietăți mecanice constante datorită utilizării porțelanului feldspatic sintetic. Consistența de pastă permite realizarea texturilor de suprafață. Particulele ceramice cu efect de lungă durată înconjoară și protejează componentele de uzură.

2

ESTETICĂ SUPERIOARĂ

Fluorescență integrată în toate nuanțele și o nuanță Fluoro suplimentară pentru a spori acest efect. Gamă largă de nuanțe pentru crearea practic nelimitată de efecte individuale (pete albe și închise la culoare, linii și fisuri).

3

UȘOR DE FOLOSIT

Machiaj gata de utilizare - nu necesită mixare. Temperatură de ardere relativ scăzută de 750 °C (1.382 °F). Toleranță mai mare la temperatură decât machiajele convenționale.

4

FINALIZARE CONTROLATĂ


Aspectul vizual din timpul aplicării este foarte apropiat de rezultatul final obținut după ardere.

27 DE NUANȚE CARE IMITĂ NATURA


TRANSLUCID



SMALT

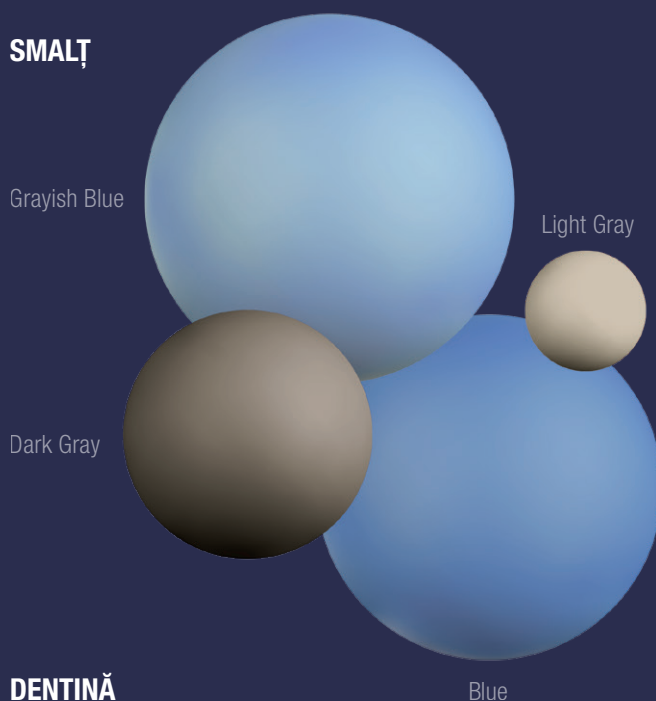

DENTINĂ

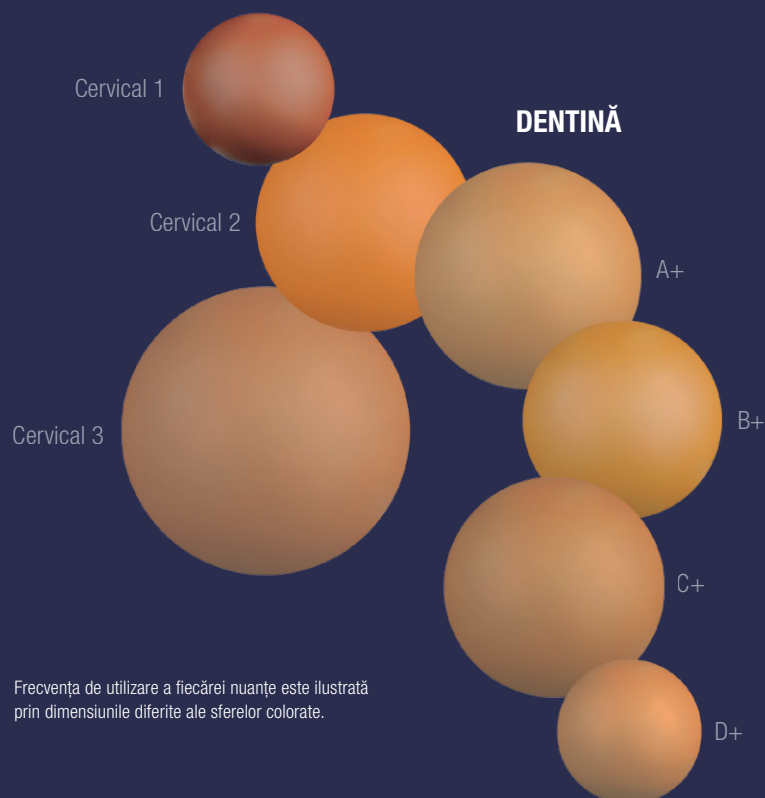

Frecvența de utilizare a fiecărei nuanțe este ilustrată prin dimensiunile diferite ale sferelor colorate.

OPTIMIZARE



AJUSTARE



CONSISTENȚĂ UNIFORMĂ

Seria CERABIEN™ ZR, la fel ca toate celelalte porțelanuri de la Kuraray Noritake Dental Inc., se bazează pe tehnologia porțelanului feldspatic sintetic, dezvoltată de NORITAKE CO., LIMITED în urmă cu mai bine de 30 de ani. Structura materialului și distribuția particulelor seamănă cu cele ale dinților naturali. Spre deosebire de materialele pe bază de feldspat natural, formula specială a CERABIEN™ ZR asigură menținerea aceleiași consistențe. Datorită acestei calități, profesioniștii din domeniul stomatologiei se pot baza pe proprietăți de manipulare remarcabile și rezultate predictibile de fiecare dată.

Pasta pentru machiaj CERABIEN™ ZR FC Paste Stain conține particulele originale de porțelan feldspatic sintetic CERABIEN™ ZR și oxizi metalici combinați într-o soluție lichidă. Consistența celor 27 de paste de colorare fluorescente este tixotropă și flexibilă, ceea ce vă permite să le aplicați în straturi ultra-subțiri de până la 0,1 mm grosime. Deoarece particulele ceramice protejează oxizii metalici de uzură, efectele de machiaj rezultate sunt menite să dureze. Procesul de aplicare este extrem de eficient și controlabil, ducând la rezultate stabile.





Cu amabilitatea: MTD Roberto Rossi



MULTI
LAYERED

FOLOSIT CU KATANA™ Zirconia

Combi-nați CERABIEN™ ZR FC Paste Stain cu KATANA™ Zirconia YML, UTML, STML sau HTML PLUS pentru a opti-miza estetica restaurărilor monolitice. Discurile inovatoare KATANA™ Zirconia multi-strat sunt recunoscute global pentru proprietățile lor optice și mecanice remarcabile. Materialele sunt, de aseme-nea, ideale pentru cazurile urgente - până la trei restaurări pot fi sinterizate în doar 54 de minute.

PRIMII PAȘI

CELE NOUĂ NUANȚE ESENȚIALE PENTRU REZULTATE NATURALE



MDT Roberto Rossi (Savona, Italia)

CERABIEN™ ZR FC Paste Stain este disponibil în 27 de nuanțe diferite, ceea ce face posibilă imitarea aproape a oricărui efect întâlnit în dentiția naturală. Atunci când utilizați sistemul pentru prima dată sau doriți să simplificați procedurile, poate fi util să cunoașteți modul în care se obțin cele mai frecvente efecte folosind un număr mai redus de nuanțe. L-am rugat pe MDT Roberto Rossi să își aleagă cele nouă nuanțe preferate și să le descrie funcțiile. Iată recomandările sale pentru a începe utilizarea CERABIEN™ ZR FC Paste Stain.

Clear Glaze



- Creează un efect tridimensional, cu aspect sticlos, în timpul microstratificării pe zirconiu.
- Se mixează cu alte nuanțe pentru a reduce intensitatea (croma) efectelor, în funcție de proporția utilizată.
- Se aplică cu o pensulă fină ca strat final pentru a crea textura principală și pentru a crește transluciditatea smalțului.

Grayish Blue (Albastru-cenușiu)



- Intensifică opalescența în treimea incizală.
- Accentuează efectul de transparență cenușie-albăstruie al smalțului subțire.

Blue (Albastru)



- Se utilizează ca nuanță principală pentru a accentua opalescența între mameloane (în restaurările realizate prin tehnica cut-back) sau pentru a delimita opalescența (în designul cu contur complet).
- Se utilizează ca nuanță complementară în zona incizală pentru a evidenția nuanțele portocalii ale restaurării.
- Se mixează cu Earth Brown pentru a obține un gri complex, cu aspect natural, utilizat pe întreaga coroană pentru a reduce luminozitatea sau aplicat local pentru a crea un efect cenușiu.

Value



- Crește contrastul smalțului într-o zonă specifică.
- Din punct de vedere optic, mărește grosimea aparentă a smalțului.
- Se mixează cu Clear Glaze pentru a modula intensitatea și luminozitatea smalțului.



Mamelon Orange 1



- Se aplică în zona incizală pentru a reproduce efecte discrete de mameloane portocalii.
- Se amestecă cu una dintre nuanțele Dentin pentru a accentua ușor efectul portocaliu al dentinei.

Mamelon Orange 2



- Se aplică în zona incizală pentru a reproduce efecte intense de mameloane portocalii, întâlnite la pacienții vârstnici și în dentina infiltrată.
- Se amestecă cu una dintre nuanțele Dentin pentru a accentua intens efectul portocaliu al dentinei.

Green 1



- Creează un efect complementar în restaurările cu tentă roșiatică (similar cu CERABIEN™ ZR Luster – Incisal Aureola).
- Se aplică în zona incizală pentru a reproduce efectele de mameloane și efectele incizale.
- Reduce excesul de roșu al restaurărilor în nuanțele B–D.

Green 2



- Se aplică în zona incizală pentru a reproduce efectele de mameloane și efectele incizale.
- Reduce excesul de roșu al restaurărilor în nuanțele A–C.

Yellow



- Intensifică nuanța gălbuie a dentinei de bază sau a mameloanelor.
- Se mixează cu Value pentru a simula opacitatea caracteristică porțiunii cervicale a dentinei.

PASTELE NOASTRE DE MACHIAJ, UN SINGUR CICLU DE ARDERE

CONCEPT DE BAZĂ PENTRU EFICIENȚĂ MAXIMĂ

Utilizarea a doar patru nuanțe de pastă de machiaj CERABIEN™ ZR FC Paste Stain - Clear Glaze, A+, Value și Grayish Blue – este o opțiune excelentă pentru individualizarea restaurărilor monolitice din zirconiu cu eficiență maximă.

TEHNICA DE LUCRU

Mai întâi, se aplică Clear Glaze pe întreaga suprafață a restaurării anterioare sau posterioare. Toate nuanțele rămase sunt, în mod ideal, pensulate în materialul de glazură. A+ este materialul preferat pentru creșterea cromei în zona cervicală și retrasarea sau închiderea la culoare a fisurilor. Value se aplică pe vârfurile cuspizilor sau pe marginile incizale, iar Grayish Blue se plasează mai jos, pe pantele cuspizilor sau în jurul mameloanelor. Împreună, aceste paste creează un efect natural de opalescență și transluciditate.




CERABIEN™ ZR FC Paste Stain


prezintă un strat de lichid transparent la suprafața materialului. Rolul acestuia este de a proteja pastele de machiaj împotriva prafului și a impurităților, motiv pentru care este recomandat să fie lăsat pe loc.

Sfat: Doriți o consistență mai fluidă a pastelor? Amestecați-le pur și simplu cu ES Liquid pentru a obține consistența dorită.

Anterior

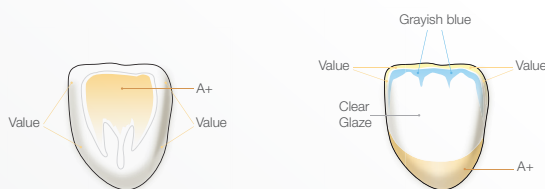

Posterior

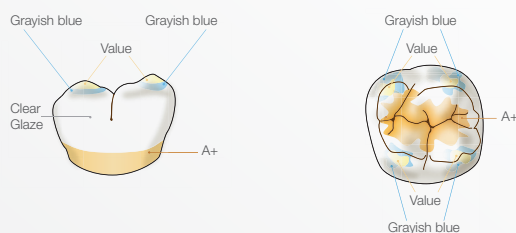

DINCOLO DE LIMITELE IMAGINAȚIEI



Bazat pe KATANA™ Zirconia YML A3 cu CERABIEN™ ZR FC Paste Stain
Cu amabilitatea TD Marco Stoppacciolli - L'Aquila, Italia

O BAZĂ SOLIDĂ

SERIA KATANA™ Zirconia MULTI-STRAT

Căutați un material de bază de la același producător? Toate materialele din seria KATANA™ Zirconia Multi-Strat reprezintă o bază solidă pentru individualizare cu CERABIEN™ ZR FC Paste Stain. Acestea sunt disponibile fie cu gradient de culoare, translucență uniformă și rezistență la încovoiere de diferite niveluri (KATANA™ Zirconia UTML, STML și HTML PLUS), fie cu gradient de culoare, translucență și rezistență la încovoiere (KATANA™ Zirconia YML).

			
UTML	STML	HTML PLUS	YML
Ultra Translucid Multistrat	Super Translucid Multistrat	(High) Transluciditate crescută Multistrata	Yttria Multistrat
Translucență* 51%	Translucență* 49%	Translucență* 45%	Translucență* 45-49%**
Rezistență* 557 MPa	Rezistență* 748 MPa	Rezistență* 1150 MPa	Rezistență* 750-1100 MPa**




*Condițiile de măsurare: evaluare în funcție de materialul de bază (culoare albă)

1 Conform ISO 6872: 2015, dimensiune mostră: 3 x 4 x 40 mm, 2 Toată transmisia luminii, iluminant: D65, Grosime mostră: 1,0 mm

**Translucența și rezistența variază în funcție de straturi.

Sursa datei: Kuraray Noritake Dental Inc. Cu amabilitatea: MTD Roberto Rossi

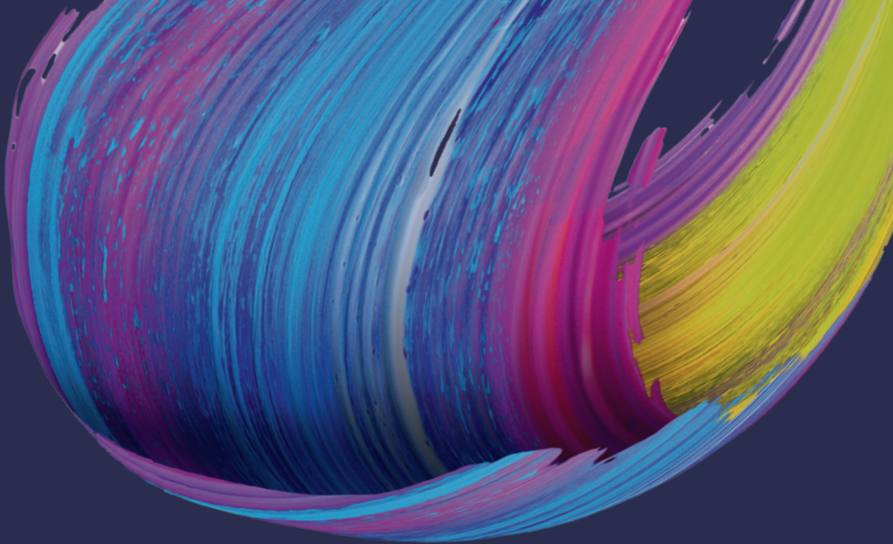

PENTRU O ESTETICĂ DE NIVEL SUPERIOR

CERABIEN™ MiLai PORCELAINS ȘI INTERNAL STAINS (machiaj intern)

Ori de câte ori cerințele estetice sunt deosebit de ridicate, iar restaurările sunt realizate din KATANA™ Zirconia UTML, STML, YML sau HTML PLUS, abordarea recomandată este de micro-stratificare.

În acest scop, se realizează, de regulă, o reducere vestibulară (cutback) de 0,3 mm. O combinație de CERABIEN™ MiLai Porcelains, Internal Stains și CERABIEN™ ZR FC Paste Stain este utilizată pentru a crea un aspect cât mai natural.

- CERABIEN™ MiLai Internal Stains: reproducerea fisurilor de smalț, a petelor închise sau albe, a mameloanelor etc.
- CERABIEN™ MiLai Porcelains: crearea efectului de fereastră (window effect), adăugarea de profunzime și volum, înlocuirea smalțului.
- CERABIEN™ ZR FC Paste Stain: crearea unui efect tridimensional, corectarea luminozității, colorare externă, texturare etc.



VARIANTE DISPONIBILE

CERABIEN™ ZR FC Paste Stain 3g

#104-5601EU	BLACK	#104-5731EU	EARTH BROWN
#104-5611EU	LIGHT GRAY	#104-5741EU	REDDISH BROWN
#104-5621EU	DARK GRAY	#104-5751EU	SALMON PINK
#104-5631EU	GRAYISH BLUE	#104-5761EU	PINK
#104-5641EU	BLUE	#104-5771EU	RED
#104-5651EU	GREEN 1	#104-5781EU	A+
#104-5661EU	GREEN 2	#104-5791EU	B+
#104-5671EU	YELLOW	#104-5801EU	C+
#104-5681EU	MAMELON ORANGE 1	#104-5811EU	D+
#104-5691EU	MAMELON ORANGE 2	#104-5821EU	WHITE
#104-5701EU	CERVICAL 1	#104-5831EU	VALUE
#104-5711EU	CERVICAL 2	#104-5841EU	FLUORO
#104-5721EU	CERVICAL 3		

#211-2389EU CERABIEN™ ZR FC Paste Stain COLOUR GUIDE

CERABIEN™ ZR FC Paste Stain 5g

#104-5851EU	GLAZE
#104-5861EU	CLEAR GLAZE

SETURI



CERABIEN™ ZR FC Paste Stain KIT

#104-5590EU - Noua Surface Stain pentru zirconiu permite caracterizarea cu ușurință. Conține 27 nuanțe.

CONȚINE:

5g: Glaze, Clear Glaze.
3g: Light Gray, Dark Gray, Grayish Blue, Blue, Cervical 1, Cervical 2, Cervical 3, A+, B+, C+, D+, Mamelon Orange 1, Mamelon Orange 2, Earth Brown, Reddish Brown, Value, Black, Green 1, Green 2, Yellow, Salmon Pink, Pink, Red, Fluoro and White shades.
+ ES Liquid & Colour Guide



CERABIEN™ ZR FC Paste Stain BASIC KIT

#104-5870EU - Un set esențial care include toate culorile de bază pentru restaurări de calitate.

CONȚINE:

5g: Clear Glaze.
3g: Dark Gray, Grayish Blue, Cervical 2, Earth Brown, Salmon Pink, A+ and White shades.
+ ES Liquid & Colour Guide



Cu amabilitatea MTD Roberto Rossi

Urmăriți-ne pe site-ul nostru sau pe rețelele de socializare



Importator UE

Kuraray Europe GmbH

Philipp-Reis-Strasse 4,
65795 Hattersheim am Main, Germania

Telefon +48 662 281 282

www.kuraraynoritake.eu/ro

dental-EasternEurope@kuraray.com

- Înainte de a utiliza acest produs, asigurați-vă că ați citit Instrucțiunile de utilizare furnizate împreună cu produsul.
- Specificațiile și aspectul produsului pot fi modificate fără notificare prealabilă.
- Culoarea imprimată poate fi ușor diferită de culoarea reală.

KATANA și CERABIEN sunt mărci comerciale ale NORITAKE CO., LIMITED.



Kuraray Noritake Dental Inc.

300 Higashiyama, Miyoshi-cho, Miyoshi, Aichi 470-0293, Japonia

